

Kan şekerinin ölçülmesi



1

Ölçüm çubuğunu çıkarma


Önden veya arkadan bir ölçüm çubuğunu hafifçe bastırarak yukarı doğru itin. Bu ölçüm çubuğunun üst kısmına da dokunabilirsiniz.



2

Ölçüm çubuğunu yerleştirme

Ölçüm çubuğunu ok işareti yönünde ölçüm çubuğu yuvasına yerleştirin. Eğer önceden cihazı açarsanız, otomatik olarak aydınlatma etkinleşir.

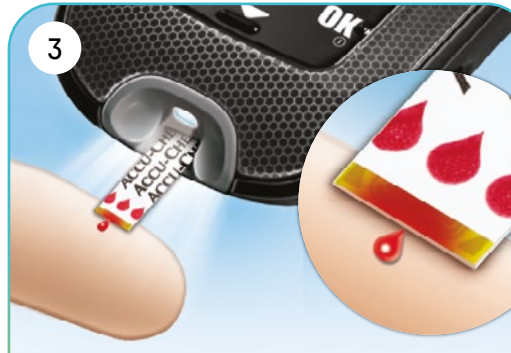

3

Kanı uygulama

Ölçüm çubuğunun sarı ucuyla kan damlasına dokununuz ve ekranda "Ölçüm yapılıyor" yazısı belirinceye kadar bekleyin.



4

Ölçüm çubuğunu çıkarma

Ölçüm çubuğu çıkarma düğmesine basarak veya ölçüm çubuğunu dışarı çekerek, ölçüm çubuğunu atın.

Hazırlama

Lanset şarjörünü yerleştirme



- 1 Kapağı çekerek çıkarın
- 2 Lanset arjörünü yerleştirin
- 3 Kapağı yerine takın



Arzu edilen delme derinliği işaretin karşısına gelinceye kadar kapağı çevirin.

Kan alma

Sadece 1 tık!

**Sadece 1
tık ile
çekin ve
tetikleyin**



Kan almak için tetik düğmesini sonuna kadar aşağıya bastırın.

Ölçümden sonra

Lanset şarjörünü hazırlama ve çıkarma



- 1 Kolu önce sonuna kadar aşağı, sonra tekrar yukarı hareket ettirin.
- 2 Çıkarırken kapağı çekin ve lanset şarjörünü dışarı çekin.

Kullanılmamış
lanset
şarjörü



Kullanılmış
lanset
şarjörü



Dikkat: Lanset şarjörlerini tüm lansetler kullanılmadan çıkarmayın. Bir kez çıkarıldıktan sonra, şarjör hijyenik nedenlerden dolayı tekrar kullanılamaz.