

! WARNUNG

- Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung des Accu-Chek Guide Blutzuckermessgeräts. Die Gebrauchsanweisung enthält wichtige Hinweise zur Handhabung sowie zusätzliche Informationen.
- Die Stechhilfe ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.

Übersicht



- 1 Display
- 2 Zurück-Taste
- 3 Auf- und Ab-Tasten
- 4 Ein/Aus/Set/OK-Taste
- 5 Beleuchteter Teststreifeneinschub
- 6 Batteriefachdeckel
- 7 Micro-USB-Anschluss
- 8 Teststreifen-Auswerfer

Einstellen von Sprache und Zeitformat



Drücken Sie kurz auf **OK**, um das Messgerät einzuschalten. **Language** (Sprache) erscheint auf dem Display. Drücken Sie auf **↕** oder **↕**, um die gewünschte Sprache auszuwählen. Drücken Sie auf **OK**.



Zeitformat erscheint auf dem Display. Drücken Sie auf **↕** oder **↕**, um **12 Stunden (am/pm)** oder **24 Stunden** auszuwählen. Drücken Sie auf **OK**, um die ausgewählte Einstellung zu speichern und anschließend zum **Hauptmenü** zurückzukehren.

Vorbereiten der Stechhilfe



Machen Sie sich mit der Accu-Chek FastClix Stechhilfe vertraut.



Nehmen Sie die Lanzetten-trommel aus ihrem Fach im Etui.



Ziehen Sie die Kappe von der Stechhilfe gerade ab. Drehen Sie die Kappe nicht.



Stecken Sie die Lanzetten-trommel mit dem weißen Ende voran in die Stechhilfe. Schieben Sie die Lanzetten-trommel so weit hinein, bis sie fest einrastet.



Setzen Sie die Kappe wieder auf die Stechhilfe. Achten Sie darauf, dass die Positionierungskerbe in der Kappe auf einer Linie mit der Positionierungslinie auf der Stechhilfe liegt.



Stellen Sie an der Stechhilfe eine für Sie passende Stechtiefe ein. Beginnen Sie mit Stufe 2. Je nach Gewebedicke kann ein höherer Wert erforderlich sein.




HINWEIS
Entnehmen Sie die Lanzetten-trommel erst, wenn alle 6 Lanzetten aufgebraucht sind; nach Entnahme aus der Stechhilfe kann die Lanzetten-trommel nicht mehr verwendet werden.



HINWEIS
Entnehmen Sie die Lanzetten-trommel erst, wenn alle 6 Lanzetten aufgebraucht sind; nach Entnahme aus der Stechhilfe kann die Lanzetten-trommel nicht mehr verwendet werden.



Setzen Sie die Kappe wieder auf die Stechhilfe. Achten Sie darauf, dass die Positionierungskerbe in der Kappe auf einer Linie mit der Positionierungslinie auf der Stechhilfe liegt.

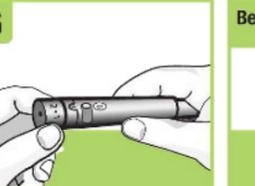

Stellen Sie an der Stechhilfe eine für Sie passende Stechtiefe ein. Beginnen Sie mit Stufe 2. Je nach Gewebedicke kann ein höherer Wert erforderlich sein.



Stellen Sie an der Stechhilfe eine für Sie passende Stechtiefe ein. Beginnen Sie mit Stufe 2. Je nach Gewebedicke kann ein höherer Wert erforderlich sein.



Verwendung der Stechhilfe: durch Drücken des Auslösekнопс wird die Stechhilfe gespannt und der Einstich erfolgt mit 1 Klick.


Durchführen einer Blutzuckermessung



Waschen Sie vor der Blutzuckermessung Ihre Hände und trocknen Sie sie ab.



Überprüfen Sie das Haltbarkeitsdatum auf der Teststreifendose. Verwenden Sie keine Teststreifen, deren Haltbarkeitsdatum überschritten ist.

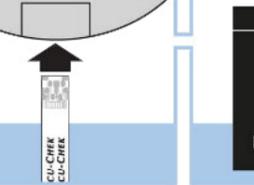


Entnehmen Sie einen Teststreifen aus der Teststreifendose. Verschließen Sie den Deckel wieder fest.



Führen Sie den Teststreifen mit den metallischen Kontakten voran in das Messgerät ein.



Das Messgerät schaltet sich ein. **Messung wird vorbereitet** erscheint auf dem Display.

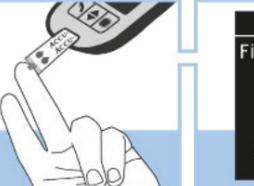

Drücken Sie die Stechhilfe fest gegen die Seite Ihrer Fingerbeere und drücken Sie den Auslösekнопс, bis der Einstich erfolgt.



Berühren Sie mit der **gelben Blutauftragsfläche** des Teststreifens den Blutstropfen. Nehmen Sie Ihren Finger vom Teststreifen weg, sobald **Messung wird durchgeführt** auf dem Display erscheint. Tragen Sie das Blut nicht auf die Oberseite des Teststreifens auf.



Messung wird durchgeführt



Der Messwert erscheint nach weniger als 4 Sekunden auf dem Display.



Zum Schluss nicht vergessen...
Bereiten Sie die Stechhilfe für die nächste Messung vor. Schieben Sie den Hebel einmal zur Seite und wieder zurück, um die nächste Lanzette zu laden. Im Fenster wird die Anzahl der verfügbaren Lanzetten angezeigt.

Sie können die kostenlose Accu-Chek Connect Diabetes Management App* hier herunterladen:



*Verfügbar für ausgewählte mobile Geräte

LETZTE ÜBERARBEITUNG: 2016-05

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CONNECT, ACCU-CHEK GUIDE und FASTCLIX sind Marken von Roche.

APPLE, das APPLE Logo und APP STORE sind Marken der Apple Inc.

GOOGLE PLAY ist eine Marke von Google Inc.

© 2016 Roche Diabetes Care
08110646001(01)-0916