

# Accu-Chek Insight Handhabungsblatt

## Neue Handhabungshinweise für den Wechsel der Ampulle



Nadel




- Koppeln Sie das Infusionsset stets von Ihrem Körper ab, bevor Sie die Ampulle austauschen.
- Verwenden Sie immer einen neuen Adapter, wenn Sie die Ampulle wechseln.
- In der Mitte der Nase des Adapters befindet sich eine Nadel. Eine Versorgung mit Insulin ist nur dann sichergestellt, wenn die Nadel mittig und rechtwinklig auf der Ampulle platziert wird (siehe **Schritt 10**).
- Wird eine leere Ampulle in die Insulinpumpe eingesetzt (z.B. für Schulungszwecke), zeigt die Pumpe die Insulinabgaben (Füllvorgang des Infusionssets, Basalrate und Bolusabgaben) dennoch an, obwohl aufgrund der leeren Ampulle kein Insulin verabreicht wird.
- Die Verwendung des falschen Ampullentyps kann eine zu hohe oder zu geringe Insulinabgabe bewirken.


### Schritt 1: Entfernen der leeren Ampulle




Drücken Sie in der Standardanzeige .

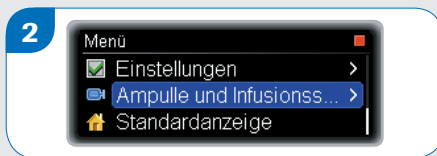

Das (Haupt-)Menü wird angezeigt. Drücken Sie , um zur Option **Ampulle und Infusionsset** zu gelangen. Drücken Sie zum Auswählen die Taste .

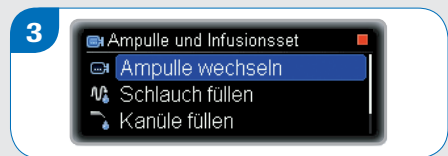

Das Menü **Ampulle und Infusionsset** wird angezeigt. Drücken Sie , um die Option **Ampulle wechseln** auszuwählen.

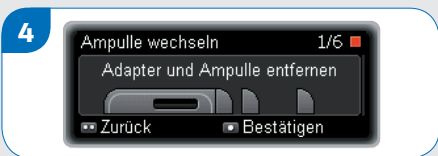


Die Anzeige **Ampulle wechseln** erscheint.





Halten Sie die Pumpe senkrecht. Drehen Sie den Adapter mit dem Schlauch gegen den Uhrzeigersinn.



Entfernen Sie den Adapter mit der Ampulle, wenn ein Winkel von ungefähr 120° erreicht ist.

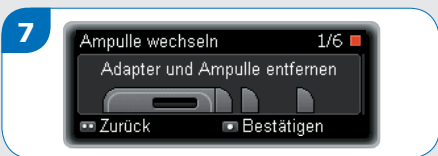

**Wichtig:** Drücken Sie , um zu bestätigen, dass Sie den Adapter und die Ampulle entfernt haben. Die Pumpe fährt automatisch die Gewindestange zurück.

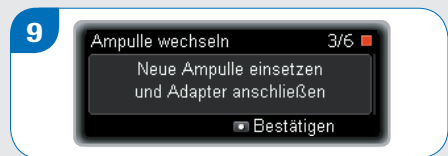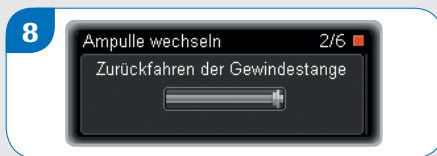

Wenn die Gewindestange vollständig zurückgefahren ist, werden Sie dazu aufgefordert, die neue Ampulle einzusetzen und den Adapter anzuschließen.

**Die Pumpe oder die Ampulle könnten beschädigt werden, wenn die Gewindestange nicht zurückgefahren ist.**

**Setzen Sie nur dann eine neue Ampulle ein, wenn die Anzeige **Neue Ampulle einsetzen und Adapter anschließen** erscheint.**

## Achtung:

- Überprüfen Sie immer die Ampulle, einschließlich des Gummikolbens am unteren Ende der Ampulle. Sie dürfen sie nicht benutzen, wenn Beschädigungen sichtbar sind oder wenn der Gummikolben bis über das weiße Band des Etiketts am unteren Ende der Ampulle gezogen ist. Dies kann eine Folge auslaufenden Insulins sein. Falls Sie vermuten, dass die Ampulle beschädigt ist, geben Sie sie in Ihrer Apotheke zurück.
- Sie dürfen die Ampulle nicht nutzen, wenn sie oder die Insulinpumpe, die die Ampulle enthält, fallen gelassen, beschädigt oder zerdrückt wurde.

## Schritt 2: Einsetzen einer neuen Ampulle

Stellen Sie sicher, dass die Ampulle und das Insulin Raumtemperatur haben.




Vergewissern Sie sich, dass Sie die Pumpe senkrecht halten. Setzen Sie die Ampulle mit dem Stopfen zuerst in das Ampullenfach ein.



Vergewissern Sie sich, dass die Ampulle korrekt eingesetzt ist. Wenn die Ampulle nicht wie angezeigt eingesetzt ist, **prüfen Sie noch einmal die Schritte 1 bis 7.**



Drücken Sie die Ampulle nicht in die Pumpe, wenn die Ampulle hervorsteht. Die Pumpe oder die Ampulle könnte dadurch beschädigt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Gewindestange vollständig zurückgefahren wurde. Wenn die Gewindestange nicht vollständig zurückgefahren wurde, **wenden Sie sich an das Accu-Chek Kunden Service Center.**

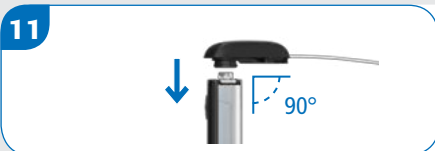

Setzen Sie einen neuen Adapter auf den Bajonettverschluss des Ampullenfachs. Achten Sie darauf, dass Sie die Nase des Adapters in einem rechten Winkel (90°) in die Aussparungen des Pumpengehäuses einführen. Anderenfalls könnte sich die Nadel verbiegen.




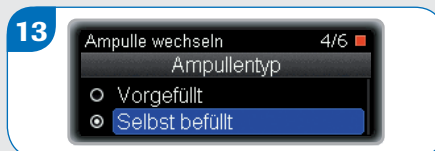
Setzen Sie den Adapter **nur** wie in **Schritt 11** beschrieben auf den Bajonettverschluss des Ampullenfachs.






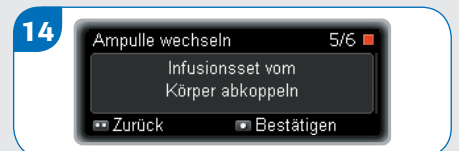
Setzen Sie den Adapter **nicht** auf den Bajonettverschluss des Ampullenfachs, wenn der Adapter nicht wie in **Schritt 11** beschrieben positioniert wurde.




Drehen Sie den Adapter im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Der Adapter ist korrekt ausgerichtet, wenn er bündig mit dem Pumpengehäuse abschließt. Drücken Sie anschließend zur Bestätigung .




Die **Anzeige Ampullentyp** erscheint. Drücken Sie  oder , um zum korrekten Ampullentyp zu gelangen. Drücken Sie zum Auswählen .




Sie werden aufgefordert, das Infusionsset von Ihrem Körper abzukoppeln. Drücken Sie zur Bestätigung .



Die Pumpe erkennt die Position des Stopfens in der Ampulle.

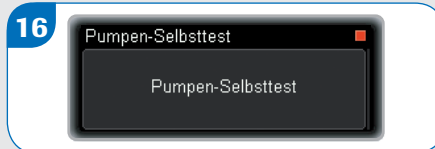

Anschließend führt die Pumpe einen Selbsttest durch. Siehe Kapitel 2.1, Seite 19.

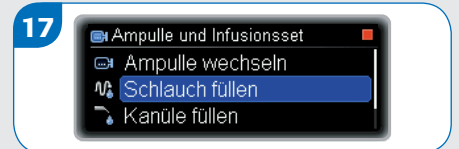

Nach dem Selbsttest kehrt die Pumpe zum Menü **Ampulle und Infusionsset** zurück. Standardmäßig ist die Option **Schlauch füllen** ausgewählt. Fahren Sie mit dem nächsten Kapitel fort.