


Vier Schritte zur Blutzuckermessung



1

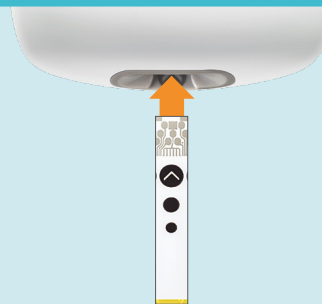

Teststreifen einführen

Waschen Sie Ihre Hände mit warmem Seifenwasser und trocknen Sie sie gründlich ab, bevor Sie mit dem Messen beginnen. Das Messgerät schaltet sich ein, wenn Sie den Teststreifen in das Gerät einführen.


2



Blut gewinnen

Wenn das blinkende Tropfensymbol erscheint, verwenden Sie die Stechhilfe zur Blutprobengewinnung.


3

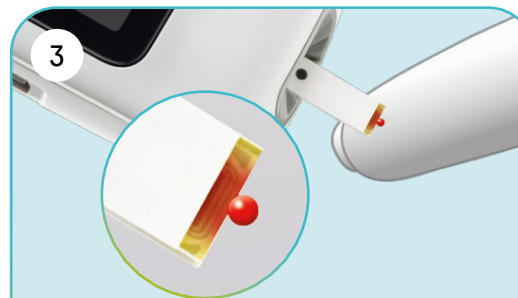

Blut auftragen

Berühren Sie den gelben Rand des Teststreifens mit dem Blutropfen. Entfernen Sie Ihren Finger vom Teststreifen, sobald das blinkende Sanduhrsymbol auf dem Display erscheint.

4

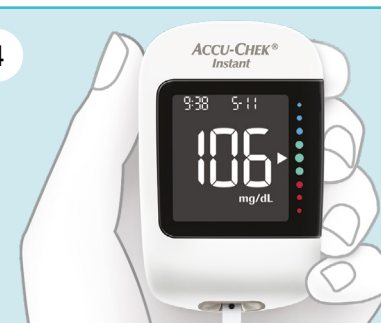

Testergebnis ablesen

Das Testergebnis erscheint in weniger als 4 Sekunden auf dem Display. Der Pfeil zeigt an, ob Ihr Testergebnis über, innerhalb oder unter Ihrem Zielbereich liegt.


In wenigen Schritten zur sanften Blutgewinnung



1

Vorbereitung


Waschen Sie Ihre Hände mit warmem Wasser und Seife, bevor Sie Blut entnehmen. Trocknen Sie Ihre Hände gut ab.

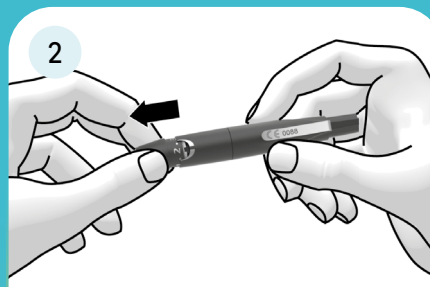

2

Kappe abziehen


Ziehen Sie die Kappe von der Stechhilfe ab.

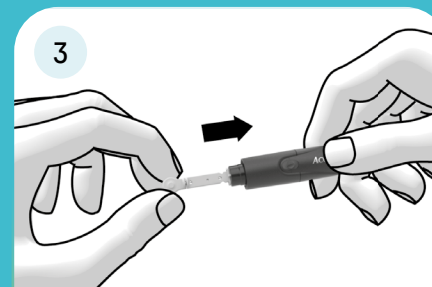

3

Lanzette einsetzen

Setzen Sie eine neue Lanzette in den Lanzettenhalter ein. Drehen Sie die Schutzkappe von der Lanzette ab. Setzen Sie die Kappe der Stechhilfe wieder auf.

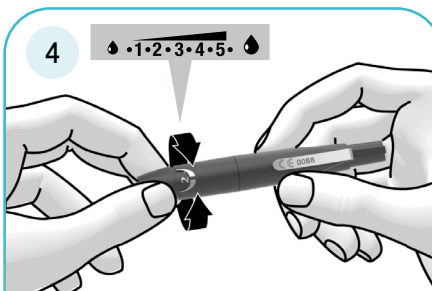

4

Stechtiefe einstellen

Sie können 11 Stechtiefen (0,5 bis 5,5) einstellen. Drehen Sie die Kappe bis die gewünschte Stechtiefe an der Markierung steht.



5

Stechhilfe spannen und Blutropfen entnehmen

Drücken Sie den Spannkнопf ganz durch. Die Stechhilfe ist gespannt, wenn die Mitte des Auslöseknopfes gelb ist. Drücken Sie die Stechhilfe fest auf die gewünschte Einstichstelle. Drücken Sie den Auslöseknopf, um Blut zu entnehmen.



6

Benutzte Lanzette auswerfen

Ziehen Sie die Kappe von der Stechhilfe ab und schieben Sie den Auswerfer nach vorn. Die benutzte Lanzette wird ausgeworfen. Setzen Sie die Kappe wieder auf.