

## Quatre étapes pour lire la glycémie



1



### Insertion de la bandelette réactive

Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon et séchez les bien avant de procéder à la mesure. Le lecteur de glycémie s'allume lorsque vous insérez la bandelette réactive dans l'appareil.


2



### Prélèvement de sang

Lorsque le symbole clignotant de goutte apparaît, utilisez l'autopiqueur pour prélever une goutte de sang.

3

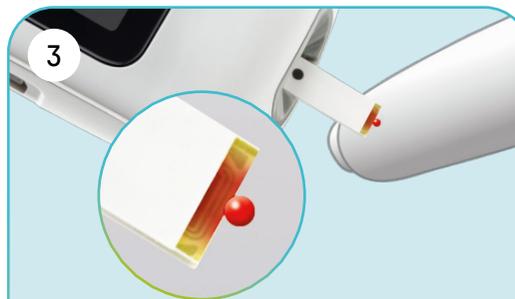

### Application du sang

Appliquez la goutte de sang contre le bord jaune de la bandelette. Retirez votre doigt de la bandelette réactive dès que le symbole clignotant du sablier apparaît à l'écran.

4



### Lecture du résultat du test

Le résultat du test apparaît à l'écran en moins de 4 secondes. La flèche indique si le résultat du test se trouve au-dessus, dans ou en dessous de l'intervalle cible.

## Un prélèvement sanguin en douceur en quelques étapes



Bouton de tension

Déclencheur

Capuchon protecteur

Lancette


Embout de réglage



1

### Préparation


Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon avant de prélever le sang. Séchez-vous bien les mains.

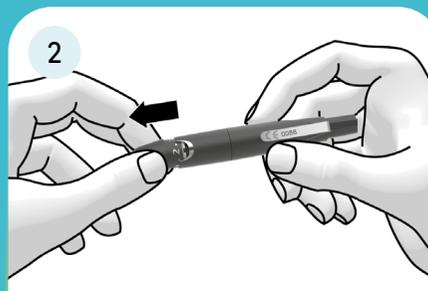

2

### Retrait de l'embout


Retirez l'embout de l'autopiqueur.

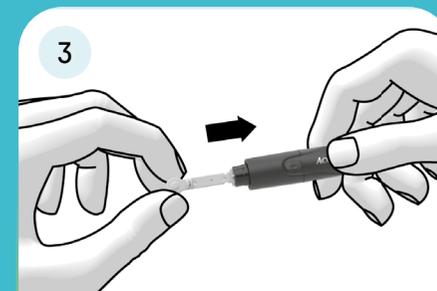

3

### Insertion de la lancette

Insérez une nouvelle lancette dans le porte-lancette. Retirez le capuchon protecteur de la lancette. Remplacez l'embout de l'autopiqueur.

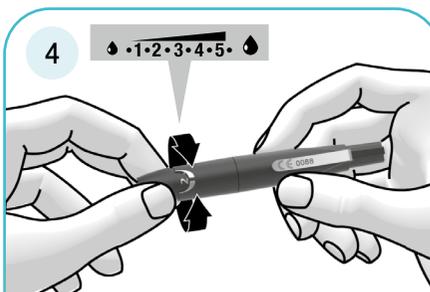

4

### Réglage de la profondeur de piqûre


11 profondeurs de réglage (de 0,5 à 5,5) sont disponibles. Tournez l'embout jusqu'à ce que la profondeur de piqûre souhaitée se trouve sur le repère.



5

### Armement de l'autopiqueur et prélèvement d'une goutte de sang

Appuyez entièrement sur le bouton de tension. L'autopiqueur est armé lorsque le milieu du bouton de déclenchement est jaune. Appuyez fermement l'autopiqueur contre la zone de prélèvement souhaitée. Appuyez sur le déclencheur pour prélever le sang.

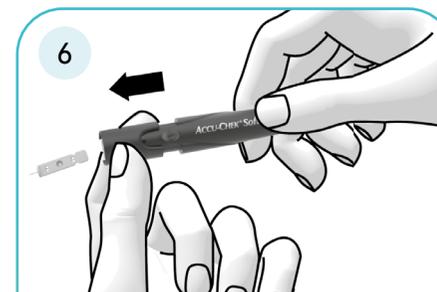

6

### Éjection de la lancette utilisée

Retirez l'embout de l'autopiqueur et poussez le piston éjecteur vers l'avant. La lancette utilisée est éjectée. Remplacez l'embout.