

Misurazione della glicemia con sole quattro operazioni



1



Inserimento della striscia reattiva

Lavarsi le mani con acqua calda e sapone e asciugarle accuratamente prima di effettuare la misurazione. Il misuratore di glicemia si attiva all'inserimento della striscia reattiva.


2



Esecuzione del prelievo di sangue

Quando appare il simbolo della goccia lampeggiante, utilizzare il pungidito per eseguire il prelievo di sangue.

3

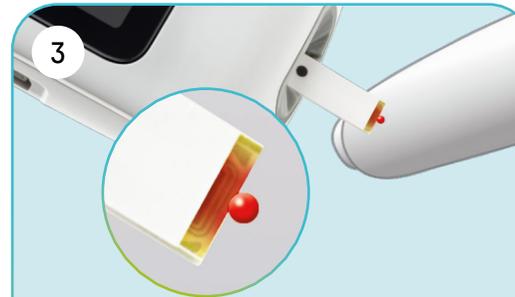

Applicazione del sangue

Toccare la goccia di sangue con il bordo giallo della striscia reattiva. Allontanare il dito dalla striscia reattiva non appena sul display lampeggia il simbolo della clessidra.

4



Letture del risultato del test

Il risultato del test appare sul display in meno di 4 secondi. La freccia indica se il risultato del test è al di sopra, all'interno o al di sotto dell'intervallo ideale.

Prelievo di sangue delicato con poche operazioni



Pulsante di carica

Pulsante di rilascio

Cappuccio di protezione

Lancetta


Cappuccio ruotabile



1

Preparativi


Lavarsi le mani con acqua calda e sapone prima di effettuare il prelievo di sangue. Asciugare bene le mani.

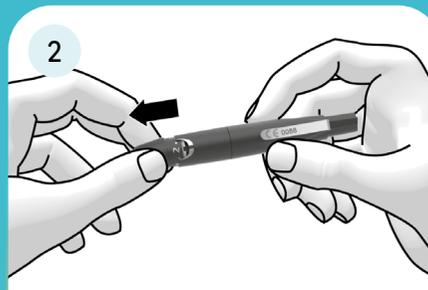

2

Togliere il cappuccio del pungidito


Si inizia togliendo il cappuccio dal pungidito.

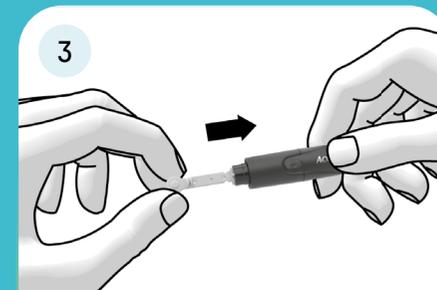

3

Inserire la lancetta

Inserire una nuova lancetta nel portalancetta. Svitare il cappuccio di protezione dalla lancetta. Riposizionare il cappuccio sul pungidito.

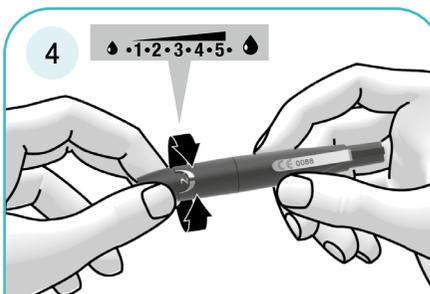

4

Regolare la profondità di puntura


Si possono regolare 11 profondità di puntura (da 0,5 a 5,5). Ruotare il cappuccio del pungidito fino a raggiungere il simbolo della profondità di puntura desiderata.



5

Caricare il pungidito e prelevare la goccia di sangue

Premere il pulsante di carica fino in fondo. Il pungidito è caricato quando il centro del pulsante di rilascio è giallo. Premere fermamente il pungidito sul punto di prelievo prescelto. Premere il pulsante di rilascio per prelevare il sangue.

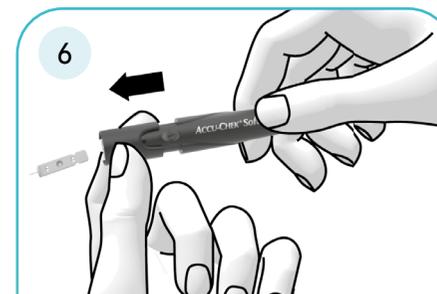

6

Rimuovere la lancetta usata

Togliere il cappuccio dal pungidito e spingere in avanti l'espulsore per rimuovere la lancetta usata. Riposizionare il cappuccio del pungidito.