

Četiri koraka za mjerenje glukoze u krvi



1



Umetanje test trake

Operite ruke toplom vodom i sapunom i temeljito ih osušite prije nego što započnete s mjerenjem. Aparat za mjerenje glukoze u krvi se uključuje kada umetnete test traku u uređaj.


2



Vađenje krvi

Kada se pojavi trepereći simbol kapljice, upotrijebite lancetar za uzimanje uzorka krvi.

3

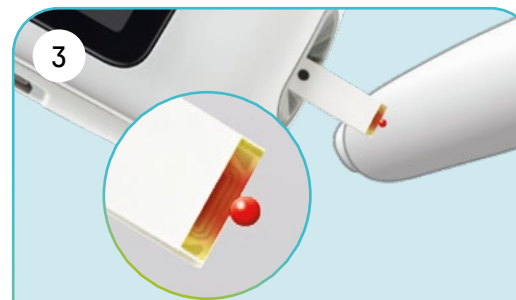

Nanošenje kapljice krvi

Dodirnite žuti rub test trake s kapljicom krvi. Uklonite prst s test trake čim se trepereći simbol pješčanog sata pojavi na zaslonu.

4



Očitavanje rezultata mjerenja

Rezultat mjerenja na zaslonu se pojavljuje unutar manje od 4 sekunde. Strelica prikazuje nalazi li se Vaš rezultat mjerenja iznad, unutar ili ispod ciljnog raspona.


U nekoliko koraka do nježnog uzimanja krvi



1

Priprema


Prije vađenja krvi operite ruke toplom vodom i sapunom. Dobro osušite ruke.

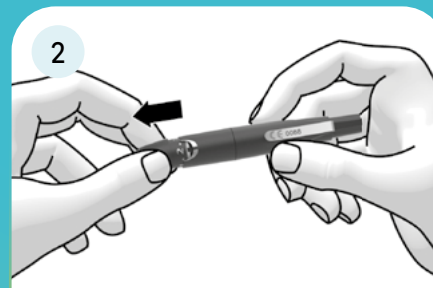

2

Skidanje kapice


Skinite kapicu s lancetara.

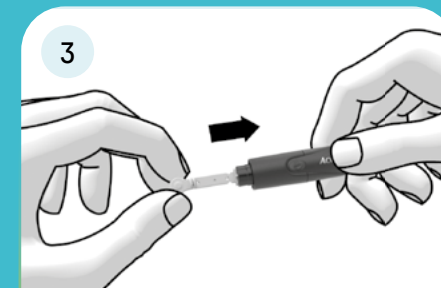

3

Umetanje lancete

Umetnite novu lancetu u držač lancete. Odvijte zaštitnu kapicu s lancete. Ponovno postavite kapicu lancetara.

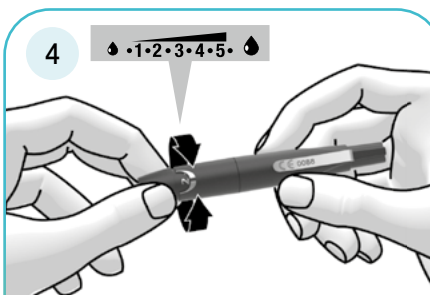

4

Namještanje dubine uboda


Možete namjestiti 11 dubina uboda (0,5 do 5,5). Okrećite kapicu dok se željena dubina uboda ne prikaže na oznaci.



5

Zatezanje lancetara i uzimanje kapljice krvi

U potpunosti prisnite tipku za zapinjanje. Lancetar je zategnut kada je sredina tipke za okidanje žuta. Čvrsto pritisnite lancetar na željeno mjesto uboda. Pritisnite tipku za okidanje kako biste uzeli kapljicu krvi.

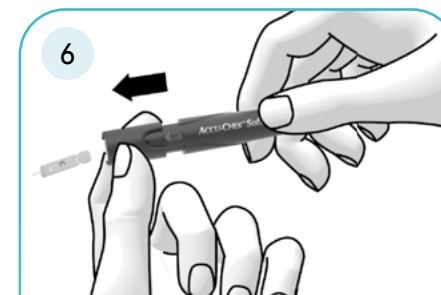

6

Izbacivanje upotrijebljene lancete

Skinite kapicu s lancetara i gurnite potisni klip naprijed. Upotrijebljena se lanceta izbacuje. Ponovno postavite kapicu.