



- Navigacijski gumb
- Intuitivna skala u boji (za tumačenje Vaših mjernih vrijednosti)
- Navigacijski gumb
- Tipka za izbacivanje
- Vođeno umetanje test trake
- Test traka sa žutom površinom za nanošenje kapljice krvi

## Četiri koraka za mjerjenje glukoze u krvi



1

### Umetanje test trake


Operite ruke toplom vodom i sapunom i temeljito ih osušite prije nego što započnete s mjerjenjem. Aparat za mjerjenje glukoze u krvi se uključuje kada umetnete test traku u uređaj.



2

### Vađenje krvi


Kada se pojavi trepereći simbol kapljice, upotrijebite lancetar za uzimanje uzorka krvi.

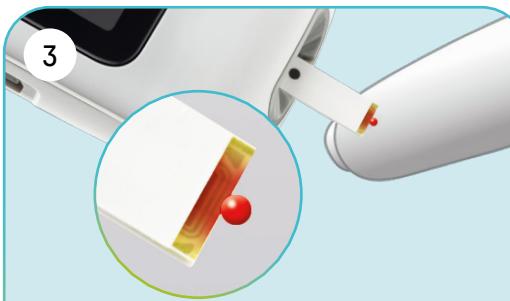

3

### Nanošenje kapljice krvi

Dodirnite žuti rub test trake s kapljicom krvi. Uklonite prst s test trake čim se trepereći simbol pješčanog sata pojavi na zaslonu.

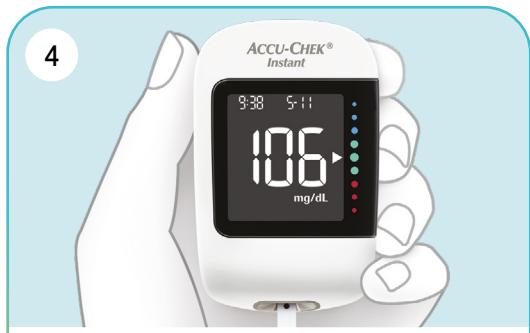

4

### Očitavanje rezultata mjerena

Rezultat mjerena na zaslonu se pojavljuje unutar manje od 4 sekunde. Strelica prikazuje nalazi li se Vaš rezultat mjerena iznad, unutar ili ispod ciljnog raspona.




## U nekoliko koraka do nježnog uzimanja krvi




### Priprema

Prije vađenja krvi operite ruke toplo vodom i sapunom. Dobro osušite ruke.

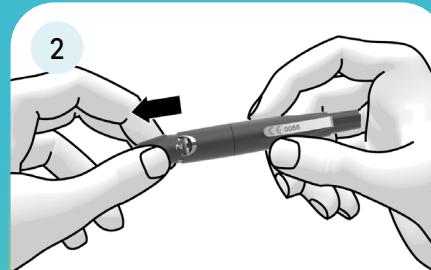


### Skidanje kapice

Skinite kapicu s lancetara.

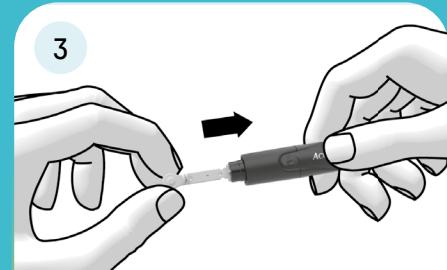

### Umetanje lancete

Umetnute novu lancetu u držać lancete. Odvijte zaštitnu kapicu s lancete. Ponovo postavite kapicu lancetara.

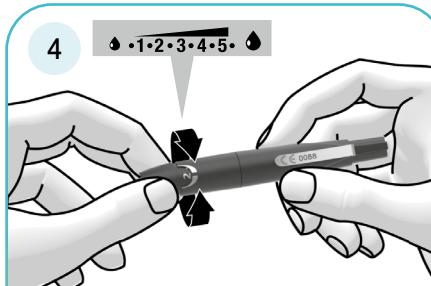


### Namještanje dubine uboda

Možete namjestiti 11 dubina uboda (0,5 do 5,5). Okrećite kapicu dok se željena dubina uboda ne prikaže na oznaci.



### Zatezanje lancetara i uzimanje kapljice krvi

U potpunosti pritisnite tipku za zapinjanje. Lancetar je zategnut kada je sredina tipke za okidanje žuta. Čvrsto pritisnite lancetar na željeno mjesto uboda. Pritisnite tipku za okidanje kako biste uzeli kapljicu krvi.

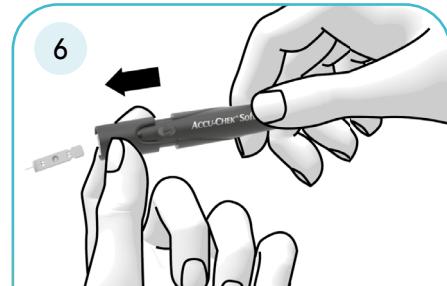

### Izbacivanje upotrijebljene lancete

Skinite kapicu s lancetara i gurnite potisni klip naprijed. Upotrijebljena se lanceta izbacuje. Ponovo postavite kapicu.