



Vier stappen voor bloedglucosemeting

1



Teststrip insteken

Was uw handen met warm water en zeep en droog ze grondig af voordat u met de meting begint. De bloedglucosemeter wordt ingeschakeld zodra u de teststrip in het apparaat steekt.


2



Bloed verkrijgen

Zodra het knipperende druppelsymbool verschijnt, gebruikt u de prikpen om een bloedmonster te verkrijgen.


3

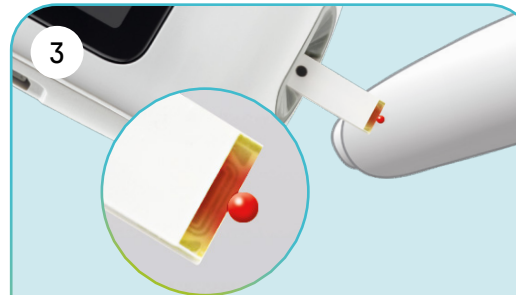

Bloed opbrengen

Raak de gele rand van de teststrip aan met de druppel bloed. Haal uw vinger weg van de teststrip zodra het knipperende zandlopersymbool op het display verschijnt.

4

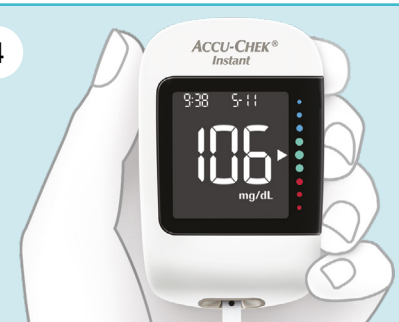

Testresultaat aflezen

Het testresultaat verschijnt na minder dan 4 seconden op het display. De pijl geeft aan of uw testresultaat boven, binnen of onder de streefwaarde ligt.


In een paar stappen pijnloos bloed afnemen



1

Vorbereitung


Was uw handen met warm water en zeep voordat u bloed gaat afnemen. Droog uw handen goed af.

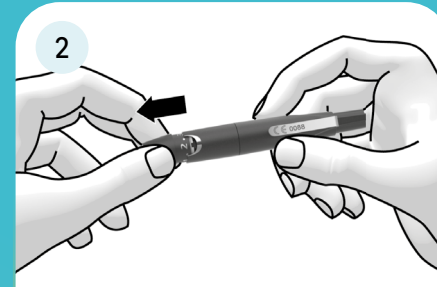

2

Dopje eraf trekken

Trek het dopje van de prikken af.

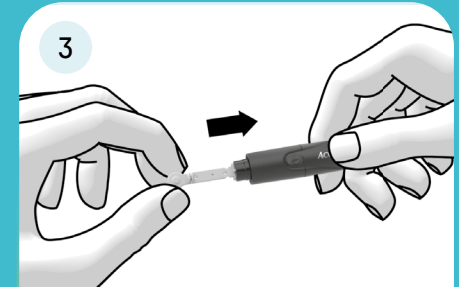


3

Lancet plaatsen

Plaats een nieuw lancet in de lancethouder.


Draai het beschermingskapje van het lancet af. Breng het dopje van de prikken weer aan.

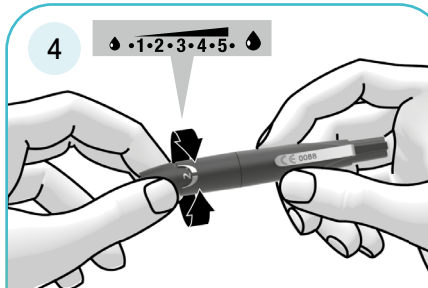

4

Prikdiepte instellen


U kunt 11 prikdieptes (0,5 tot 5,5) instellen. Draai aan het dopje tot de gewenste prikdiepte op de markering staat.

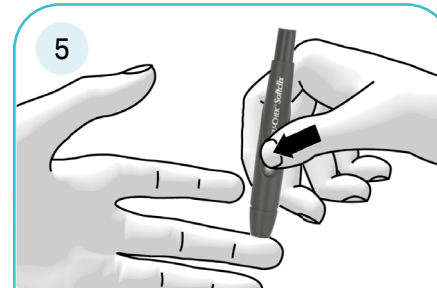

5

Prikpen spannen en bloeddruppel afnemen

Druk de aanspanknop helemaal in. De prikpen is gespannen wanneer het midden van de prikknop geel is. Druk de prikpen stevig op de gewenste prikplaats. Druk op de prikknop om bloed af te nemen.

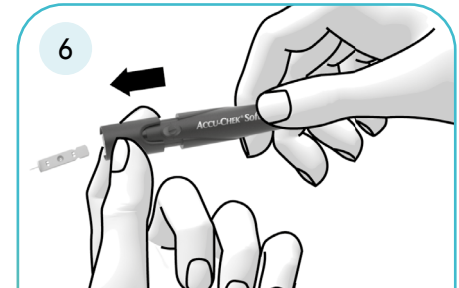

6

Gebruikt lancet uitwerpen

Trek het dopje van de prikken af en schuif het uitwerpmechanisme naar voren. Het gebruikte lancet wordt uitgeworpen. Breng het dopje weer aan.