

Cztery kroki do pomiaru stężenia glukozy



1



Wprowadzenie testu paskowego

Umyć ręce ciepłą wodą z mydłem i wytrzeć je dokładnie przed rozpoczęciem pomiaru. Glukometr włącza się po wprowadzeniu testu paskowego do urządzenia.


2



Pozyskanie krwi

Po pojawieniu się symbolu kropli należy użyć nakłuwacza do pozyskania próbki krwi.


3

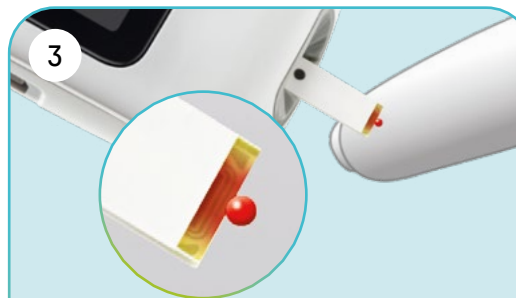

Nanoszenie krwi

Dotknąć żółtej krawędzi testu paskowego kroplą krwi. Zdjąć palec z testu paskowego, gdy na ekranie pojawi się migający symbol klepsydy.

4

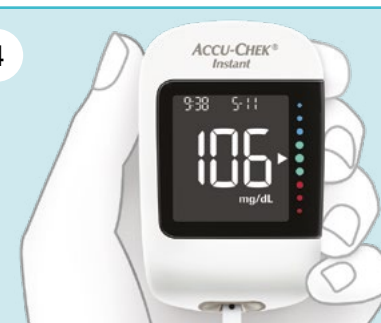

Odczyt wyniku testu

Wynik testu pojawia się na ekranie w ciągu mniej niż 4 sekund. Strzałka wskazuje, czy wynik testu znajduje się powyżej, w obrębie, czy poniżej zakresu docelowego.

Delikatne pozyskanie krwi w kilku krokach

