


Cztery kroki do pomiaru stężenia glukozy



1

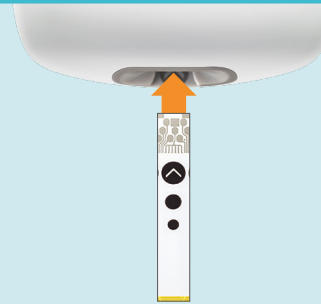

Wprowadzenie testu paskowego

Umyć ręce ciepłą wodą z mydłem i wytrzeć je dokładnie przed rozpoczęciem pomiaru. Glukometr włącza się po wprowadzeniu testu paskowego do urządzenia.


2



Pozyskanie krwi

Po pojawieniu się symbolu kropli należy użyć nakłuwacza do pozyskania próbki krwi.

3

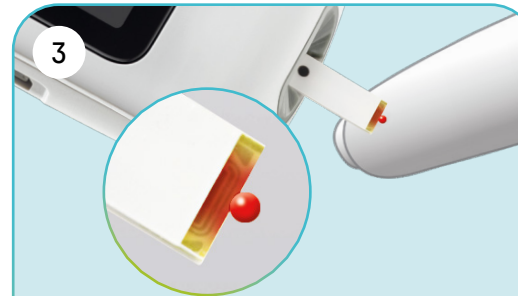

Nanoszenie krwi

Dotknąć żółtej krawędzi testu paskowego kroplą krwi. Zdjąć palec z testu paskowego, gdy na ekranie pojawi się migający symbol klepsydry.

4



Odczyt wyniku testu

Wynik testu pojawia się na ekranie w ciągu mniej niż 4 sekund. Strzałka wskazuje, czy wynik testu znajduje się powyżej, w obrębie, czy poniżej zakresu docelowego.

Delikatne pozyskanie krwi w kilku krokach



Przycisk naciągający

Przycisk zwalniający

Osłonka zabezpieczająca

Lancet


Obrotowa nasadka



1

Przygotowanie


Przed pobraniem krwi należy umyć ręce ciepłą wodą i mydłem. Dokładnie wytrzeć ręce.

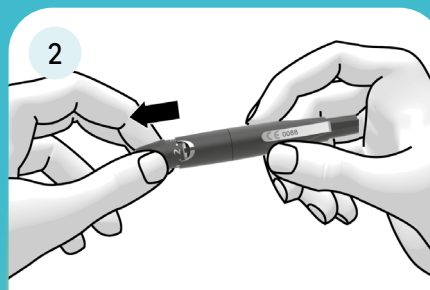

2

Zdjęcie nasadki


Zdjąć nasadkę z nakłuwacza.

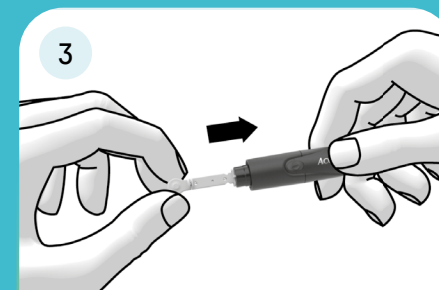

3

Wkładanie lancetu

Włożyć nowy lancet w uchwyt lancetu. Odkręcić osłonkę zabezpieczającą z lancetu. Założyć z powrotem nasadkę nakłuwacza.

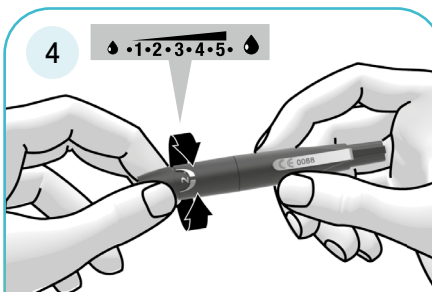

4

Ustawienie głębokości nakłucia


Możliwe jest ustawienie 11 głębokości nakłucia (od 0,5 do 5,5). Obrócić nasadkę, aż na znaczniku będzie widoczna żądana głębokość nakłucia.



5

Naciągnięcie nakłuwacza i pobranie kropli krwi

Nacisnąć do końca przycisk naciągający. Nakłuwacz jest naciągnięty, gdy środek przycisku zwalniającego jest żółty. Mocno docisnąć nakłuwacz dożądanego miejsca wklucia. Nacisnąć przycisk zwalniający, aby pobrać krew.

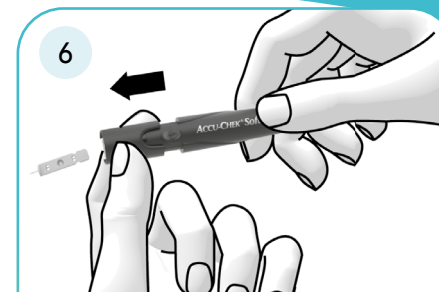

6

Wyrzut użytego lancetu

Zdjąć nasadkę z nakłuwacza i przesunąć zwalniacz lancetu do przodu. Użyty lancet jest wyrzucany. Założyć z powrotem nasadkę.