



Botão de navegação

Escala de cores intuitiva
(para interpretação dos
valores medidos)

Botão de navegação

Botão de ejeção

Inserção guiada na
ranhura de tiras-teste



Tira-teste com superfície
amarela de aplicação do
sangue

Quatro passos para medir a glicemia

1



Inserir a tira-teste

Lave as mãos com água morna e sabão e seque-as minuciosamente antes de iniciar a medição. O aparelho de medição liga-se assim que introduzir a tira-teste no aparelho.


2



Colher sangue

Quando surgir o símbolo de gota intermitente, use o dispositivo de punção para colher uma amostra de sangue.

3

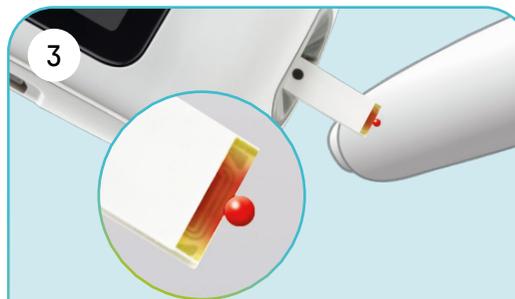

Aplicar o sangue

Toque com a gota de sangue na margem amarela da tira-teste. Retire o dedo da tira-teste quando o símbolo da ampulheta começar a piscar no visor.

4



Ler o resultado do teste

O resultado do teste surge no visor em menos de 4 segundos. A seta indica se o resultado do teste está acima, dentro ou abaixo do intervalo-alvo.

Colheita de sangue suave em poucos passos



Botão de armar

Botão de disparo

Tampa de proteção

Lanceta


Tampa rotativa



1

Preparação


Lave as mãos com água morna e sabão antes da colheita de sangue. Seque-as bem.

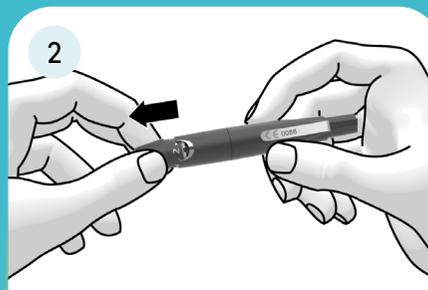

2

Tirar a tampa do dispositivo


Puxe a tampa do dispositivo de punção para a remover.

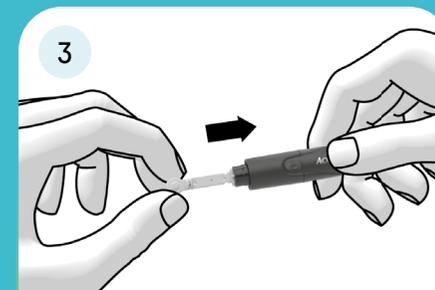

3

Inserir a lanceta

Insira uma lanceta nova no respetivo suporte. Rode a tampa de proteção da lanceta para a retirar. Volte a colocar a tampa do dispositivo de punção.

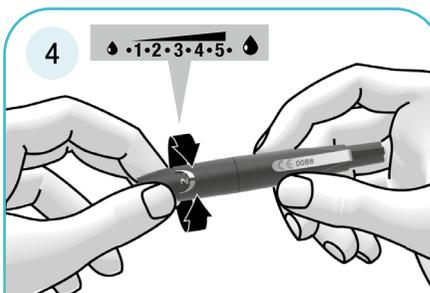

4

Definir a profundidade de penetração

Pode definir uma de 11 profundidades de penetração (0,5 a 5,5). Rode a tampa do dispositivo até a profundidade de penetração ficar na marca.



5

Armar o dispositivo de punção e colher uma gota de sangue

Prima o botão de armar até ao fim. O dispositivo de punção está armado quando o centro do botão de disparo estiver amarelo. Prima bem o dispositivo de punção no local de punção pretendido. Prima o botão de disparo para colher o sangue.



6

Ejetar a lanceta usada

Puxe a tampa do dispositivo de punção para a remover e empurre o ejetor para a frente. A lanceta usada é ejetada. Volte a colocar a tampa do dispositivo.