

Patru pași pentru măsurarea glicemiei



1



Introducerea benzii de testare

Spălați-vă pe mâini cu apă caldă cu săpun și uscați-le bine înainte de a începe măsurarea. Glucometru pornește atunci când introduceți banda de testare în aparat.


2



Recoltarea de sânge

Atunci când apare simbolul intermitent al picăturii, utilizați dispozitivul de înțepare pentru a recolta o probă de sânge.

3

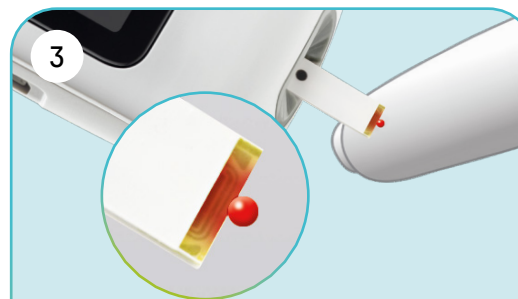

Aplicați sângele

Atingeți marginea galbenă a benzii de testare cu picătura de sânge. Îndepărtați degetul de pe banda de testare imediat ce pe ecran apare simbolul intermitent al clesidrei.

4



Citiți rezultatul testului


Rezultatul testului apare pe afișaj în mai puțin de 4 secunde. Săgeata indică dacă rezultatul testului dumneavoastră se situează peste, în sau sub intervalul țintă.

Recoltare delicată a sângelui în doar câțiva pași




Pregătire

Spălați-vă pe mâini cu apă caldă și săpun înainte de a recolta sânge. Uscăți-vă bine mâinile.

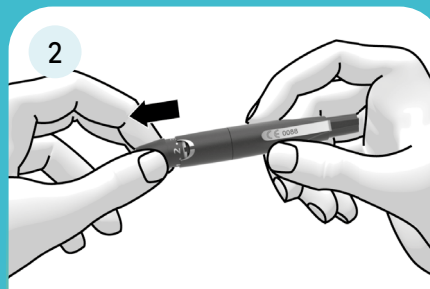


Scoateți capacul

Scoateți capacul dispozitivului de înțepare.

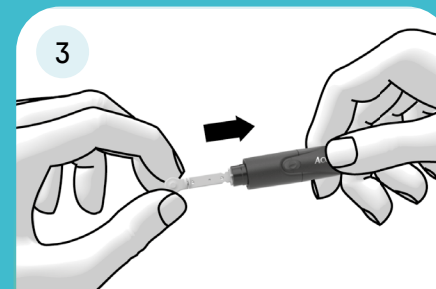

Introduceți lanțeta

Introduceți o lanțetă nouă în suportul pentru lanțetă. Îndepărtați prin răsucire capacul protector de pe lanțetă. Puneți din nou la loc capacul dispozitivului de înțepare.

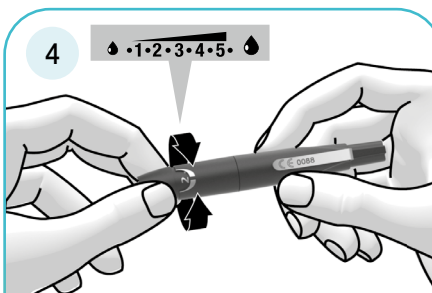

Reglarea adâncimii de înțepare

Puteți regla 11 adâncimi de înțepare (0,5 până la 5,5). Rotiți capacul până când adâncimea de înțepare dorită se situează la marcaj.



Armați dispozitivul de înțepare și prelevați picăturile de sânge

Apăsați butonul de armare până la capăt. Dispozitivul de înțepare este armat atunci când centrul butonului de declanșare este galben. Apăsați ferm dispozitivul de înțepare pe locul de înțepare dorit. Apăsați butonul de declanșare pentru a preleva sânge.



Eliminați lanțeta utilizată

Scoateți capacul dispozitivului de înțepare și împingeți ejectorul înainte. Lanțeta folosită este ejectată. Puneți capacul la loc.