

Четыре действия для измерения уровня сахара в крови



1



Вставить тест-полоску

Перед началом измерения вымойте теплой водой с мылом и тщательно высушите руки. Измерительный прибор включится, как только вы вставите в него тест-полоску.


2



Взять кровь на анализ

После того, как на экране загорается символ "Капля", воспользуйтесь прокалывателем, чтобы взять кровь на анализ.


3

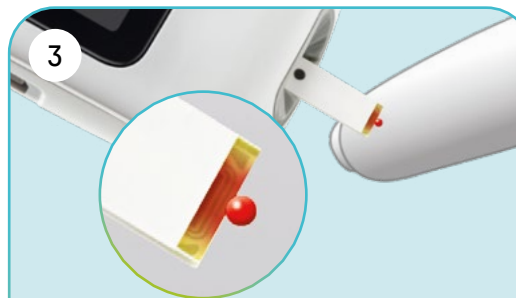

Нанести кровь на тест-полоску

Прикоснитесь каплей крови к желтому краю тест-полоски. Как только на экране загорается символ "Песочные часы", уберите палец с тест-полоски.


4

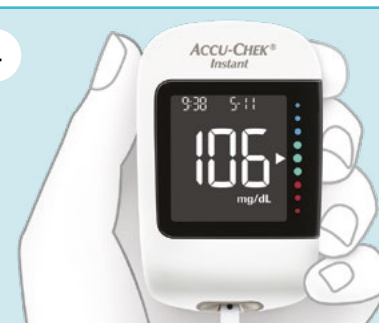

Ознакомиться с результатом измерения

Результат измерения появится на экране в течение 4 секунд. Стрелка показывает, находится ли результат измерения ниже, выше или в пределах Вашего целевого диапазона.


Быстрое и щадящее взятие крови на анализ

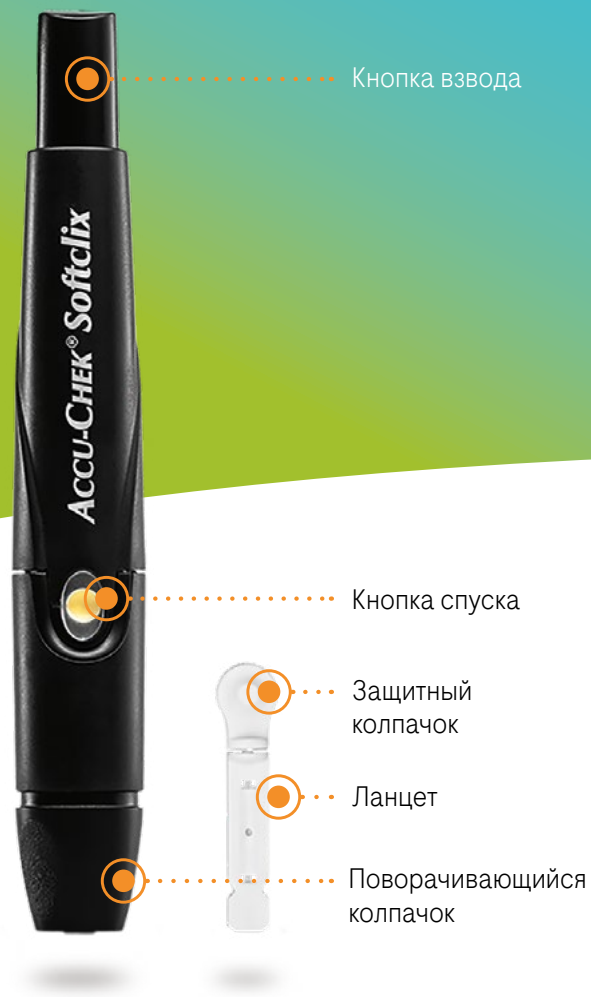

1

Подготовка


Перед взятием крови на анализ вымойте руки теплой водой с мылом. Тщательно высушите руки.

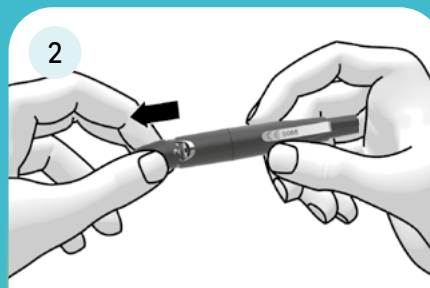

2

Снять колпачок


Снимите колпачок с прокалывателя.

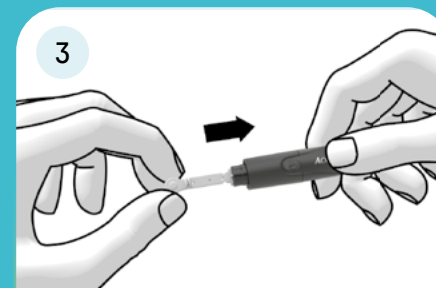

3

Вставить ланцет

Вставьте новый ланцет в держатель для ланцета. Отверните с ланцета защитный колпачок. Вновь установите на прокалыватель колпачок прокалывателя.

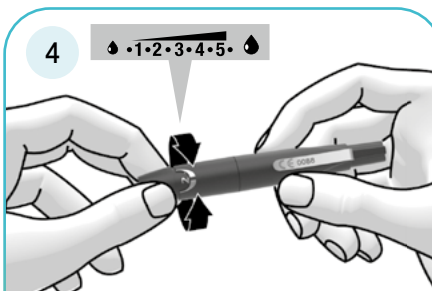

4

Отрегулировать глубину прокола

Вы можете выбрать между 11 значениями глубины прокола (0,5 - 5,5). Для этого поверните колпачок прокалывателя до тех пор, пока требуемое значение не установится напротив отметки.



5

Взвести прокалыватель и взять каплю крови

Нажмите кнопку взвода до упора. Прокалыватель взведен, когда середина кнопки спуска желтая. Плотнo прижмите прокалыватель к месту прокола. Нажмите кнопку спуска, чтобы взять кровь.



6

Удалить использованный ланцет

Снимите колпачок с прокалывателя и сдвиньте вперед выбрасыватель. Использованный ланцет выпадет. Вновь установите колпачок на прокалыватель.