

## Četiri koraka za merenje glukoze u krvi



1



### Umetanje test trake

Operite ruke toplom vodom i sapunom i dobro ih osušite pre nego što počnete sa merenjem. Aparat za merenje glukoze u krvi se uključuje kada umetnete test traku u uređaj.


2



### Uzimanje uzorka krvi

Kada se pojavi trepćući simbol kapljice, iskoristite lancetar za uzimanje uzorka krvi.


3

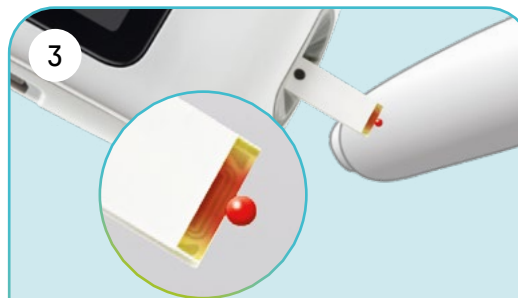

### Nanošenje kapljice krvi

Dotaknite žutu ivicu test trake sa kapljicom krvi. Odstranite prst sa test trake čim se trepćući simbol pešćanog časovnika pojavi na ekranu.

4

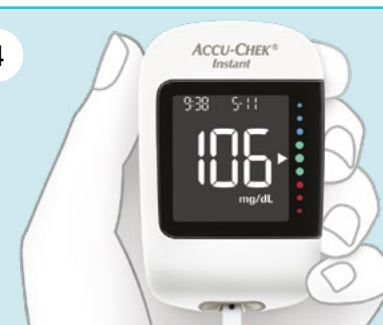

### Očitavanje rezultata merenja

Rezultat merenja se pojavljuje na ekranu nakon manje od 4 sekunde. Strelica prikazuje da li se Vaš rezultat merenja nalazi iznad, unutar ili ispod ciljnog raspona.


### U nekoliko koraka do nežnog uzimanja krvi



1

#### Priprema


Pre vađenja krvi operite ruke toplom vodom i sapunom. Dobro osušite ruke.

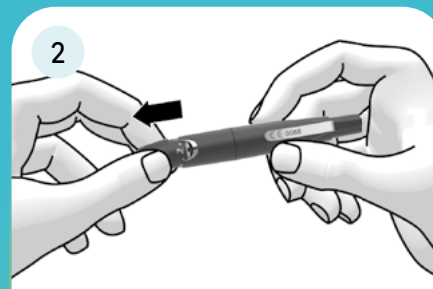

2

#### Skidanje kapice


Skinite kapicu sa lancetara.

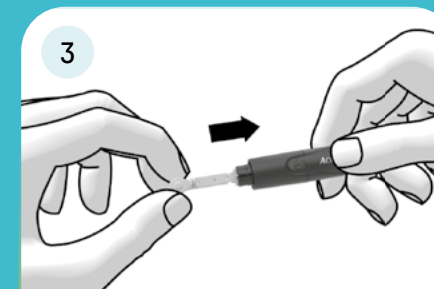

3

#### Umetanje lancete

Umetnite novu lancetu u držač lancete. Odvrtite zaštitnu kapicu sa lancete. Ponovo postavite kapicu lancetara.

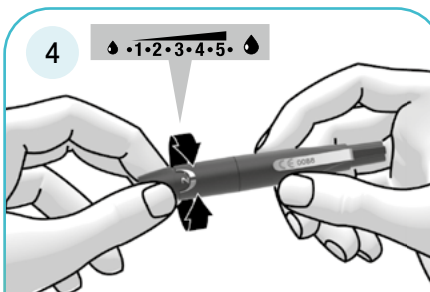

4

#### Podešavanje dubine uboda

Možete da podesite 11 dubina uboda (od 0,5 do 5,5). Okrećite kapicu dok se željena dubina uboda ne prikaže na oznaci.



5

#### Zatezanje lancetara i uzimanje kapljice krvi

Do kraja pritisnite dugme za zatezanje. Lancetar je zategnut kada je sredina dugmeta za okidanje žuta. Čvrsto pritisnite lancetar na željeno mesto uboda. Pritisnite dugme za okidanje da biste uzeli kapljicu krvi.



6

#### Izbacivanje iskorišćene lancete

Skinite kapicu sa lancetara i gurnite potisni klip napred. Iskorišćena lanceta se izbacuje. Ponovo postavite kapicu.