



Dugme za navigaciju

Intuitivna skala u boji
(za tumačenje Vaših
mernih vrednosti)

Dugme za navigaciju

Dugme za izbacivanje

Vođeno umetanje
test trake

Test traka sa žutom
površinom za nanošenje
kapljice krvi

Četiri koraka za merenje glukoze u krvi



1

Umetanje test trake


Operite ruke toplom vodom i sapunom i dobro ih osušite pre nego što počnete sa merenjem. Aparat za merenje glukoze u krvi se uključuje kada umetnete test traku u uređaj.



2

Uzimanje uzorka krvi


Kada se pojavi trepćući simbol kapljice, iskoristite lancetar za uzimanje uzorka krvi.

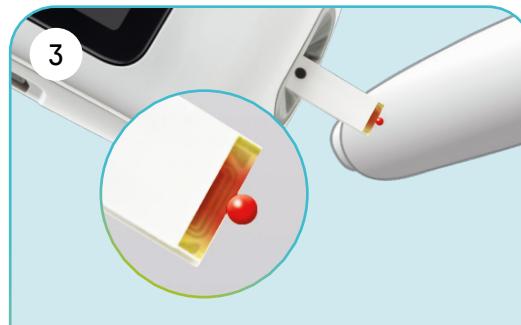

3

Nanošenje kapljice krvi

Dotaknite žutu ivicu test trake sa kapljicom krvi. Odstranite prst sa test trake čim se trepćući simbol peščanog časovnika pojavi na ekranu.

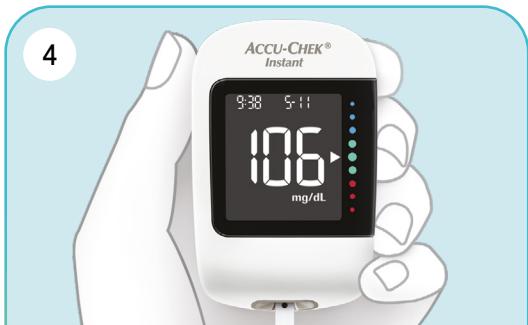

4

Očitavanje rezultata merenja

Rezultat merenja se pojavljuje na ekranu nakon manje od 4 sekunde. Strelica prikazuje da li se Vaš rezultat merenja nalazi iznad, unutar ili ispod ciljnog raspona.



Dugme za zatezanje

Dugme za okidanje

Zaštitna kapica

Lanceta


Okretna kapica

U nekoliko koraka do nežnog uzimanja krvi




Priprema

Pre vađenja krvi operite ruke toploim vodom i sapunom. Dobro osušite ruke.

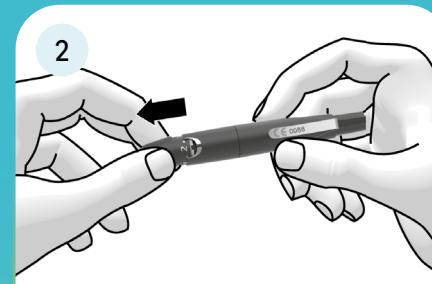


Skidanje kapice

Skinite kapicu sa lancetara.

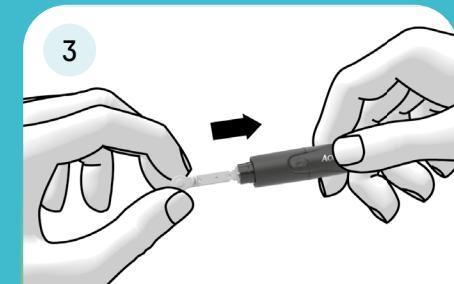


Umetanje lancete

Umetnute novu lancetu u držać lancete. Odrvajte zaštitnu kapicu sa lancete. Ponovo postavite kapicu lancetara.

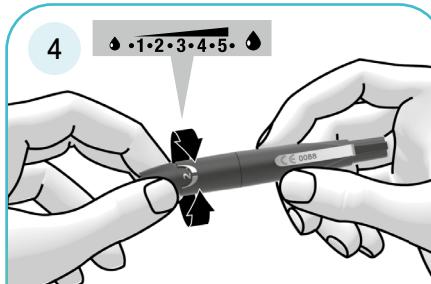


Podešavanje dubine uboda

Mozete da podesite 11 dubina uboda (od 0,5 do 5,5). Okretite kapicu dok se željena dubina uboda ne prikaže na oznaci.

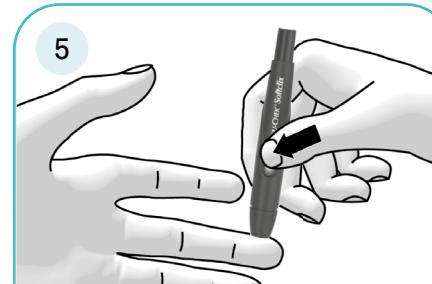

Zatezanje lancetara i uzimanje kapljice krvi

Do kraja pritisnite dugme za zatezanje. Lancet je zategnut kada je sredina dugmeta za okidanje žuta. Čvrsto pritisnite lancet na željeno mesto uboda. Pritisnite dugme za okidanje da biste uzeli kapljicu krvi.

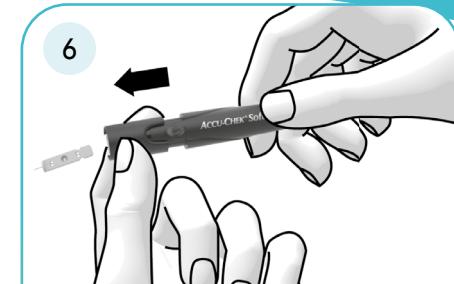

Izbacivanje iskorišćene lancete

Skinite kapicu sa lancetara i gurnite potisni klip napred. Iskorišćena lanceta se izbacuje. Ponovo postavite kapicu.