

Cuatro pasos para la medición de la glucemia



1



Insertar la tira reactiva

Antes de iniciar la medición, lávese las manos con agua jabonosa caliente y séqueselas bien. El medidor se conecta cuando se inserta la tira reactiva en el mismo.


2



Extraer sangre

Cuando visualice el símbolo de una gota parpadeante, utilice el dispositivo de punción para extraer la prueba de sangre.

3

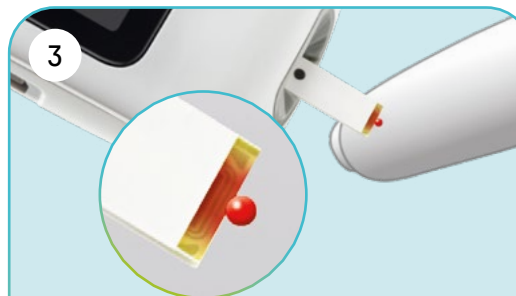

Aplicar la sangre

Toque el borde amarillo de la tira reactiva con la gota de sangre. Retire su dedo de la tira reactiva en el momento en el que visualice el símbolo de un reloj de arena parpadeante en el display.

4



Leer el resultado de la prueba


El resultado de la prueba se visualiza en el display en menos de 4 segundos. La flecha indica si el resultado de la prueba se encuentra por encima, dentro o por debajo de su rango objetivo.

Extracción de sangre suave en pocos pasos




Preparación

Antes de proceder a la extracción de sangre lávese las manos con agua caliente y jabón. Seguidamente, séquese bien las manos.

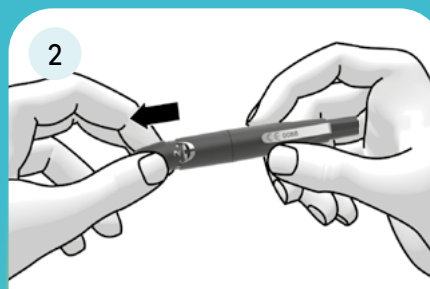


Extraer el capuchón

Retire el capuchón del dispositivo de punción.

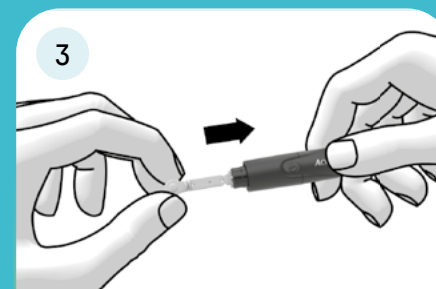

Colocar la lanceta

Coloque una lanceta nueva en el portalancetas. Desenrosque el capuchón protector de la lanceta. Vuelva a colocar el capuchón del dispositivo de punción.

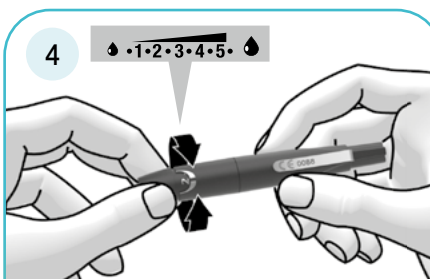

Ajustar la profundidad de la punción

Usted puede ajustar 11 profundidades de punción (0,5 hasta 5,5). Gire el capuchón hasta que la profundidad de punción deseada se encuentre en la marca.



Tensar el dispositivo de punción y extraer la gota de sangre

Presione completamente el botón de tensión. El dispositivo de punción está tensado cuando el centro del botón disparador es de color amarillo. Presione firmemente el dispositivo de punción en punto de punción deseado. Pulse el botón disparador para extraer sangre.



Expulsar la lanceta utilizada

Retire el capuchón del dispositivo de punción y empuje el expulsador hacia delante. La lanceta utilizada se expulsa. Vuelva a colocar el capuchón.