



Gezinti düğmesi

Sezgisel renk tayfı
(ölçüm değerlerinizin
yorumlanması için)

Gezinti düğmesi

Çıkarma tuşu


Kılavuzlu
ölçüm şeridi yuvası



Sarı renkli kan yüzeyi
bulunan ölçüm şeridi

Dört adımda kan şekeri ölçümü

1

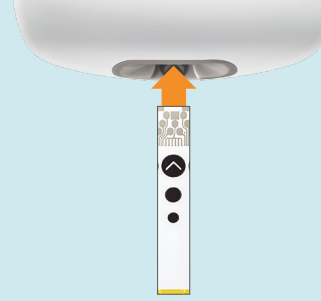

Ölçüm şeridinin yerleştirilmesi

Ölçüme başlamadan önce ellerinizi sıcak su ve sabunla iyice yıkayıp kurulayınız. Ölçüm şeridini ölçüm cihazına yerleştirdiğinizde cihaz kendiliğinden açılır.


2



Kanın alınması

Yanıp sönen damla sembolü gözüktüğünde kan örneği almak için delme cihazını kullanınız.

3

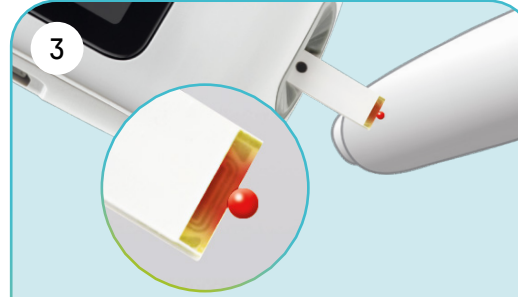

Kanın sürülmesi

Ölçüm şeridinin sarı kenarını kan damlasına değdiriniz. Ekranda yanıp sönen kum saati sembolü gözüktüğünde parmağınızı ölçüm şeridinden çekiniz.

4



Ölçüm sonucunun okunması


Ölçüm sonucu 4 saniyeden kısa bir sürede ekranda gözükür. Ok, ölçüm sonucunuzun hedef aralığın üstünde mi yoksa altında mı olduğunuzu gösterir.

Birkaç adımda yumuşak bir şekilde kan alma




1 Hazırlık

Kan almadan önce ellerinizi sıcak su ve sabunla yıkayınız. Ellerinizi iyice kurulayınız.

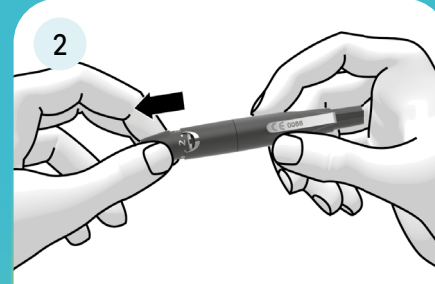


2 Kapağını açınız

Delme kaleminin kapağını çıkartınız.

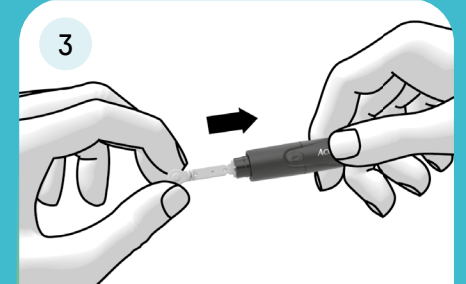

3 İğneyi yerleştiriniz

İğne tutucuya yeni bir iğne takınız. İğnenin koruyucu kapağını çıkartınız. Delme kaleminin kapağını yeniden takınız.

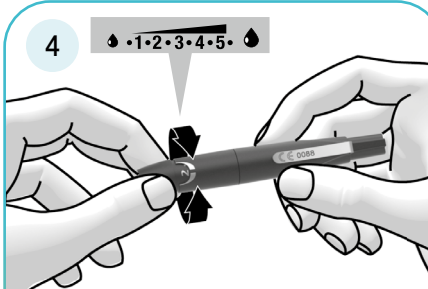


4 Delme kalemini ayarlayınız

11 delme derinliği (0,5 ila 5,5) ayarlayabilirsiniz. İşaretin karşısına istediğiniz delme derinliği gelinceye kadar kapağı çeviriniz.



5 Delme kalemini kurunuz ve kan damlası çıkartınız

Kurma düğmesine tamamen bastırınız. Tetik düğmesi sarı renkli ise delme kalemi kurulu durumdadır. Delme kalemini delmek istediğiniz noktaya bastırınız. Kan almak için tetik düğmesine basınız.

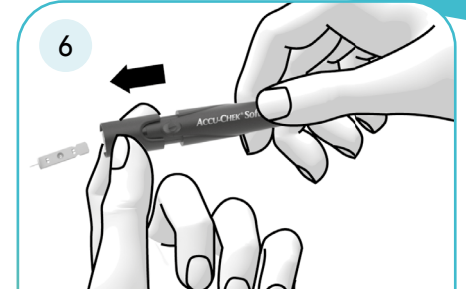

6 Kullanılmış iğneyi atınız

Delme kaleminin kapağını çıkartınız ve atıcı ucu öne doğru çekiniz. Kullanılmış iğne çıkartılıp atılacaktır. Kapağı yeniden yerine yerleştiriniz.