

SIE HABEN INTERESSE AN ACCU-CHEK® MOBILE?

Bestellen Sie sich jetzt unentgeltlich Ihr
Blutzuckermessgerät zum Testen:



www.accu-chek.de/testen



Kostenfreie Telefonnummer:

0800 4466800

(Mo.-Fr., 08:00-18:00 Uhr)



QR-Code scannen



Sie wollen mehr erfahren?

Unsere Mitarbeiter im Accu-Chek Kunden Service Center sind für Sie da!
Kostenfreie Telefonnummer 0800 4466800 (Mo-Fr, 08:00-18:00 Uhr).
Oder besuchen Sie unser Onlineportal www.accu-chek.de/mobile
bzw. unsere Facebook-Seite www.facebook.com/accuchekde

ACCU-CHEK und ACCU-CHEK GUIDE sind Marken von Roche.
mySugr ist eine Marke der mySugr GmbH.
© 2019 Roche Diabetes Care. Alle Rechte vorbehalten.

www.accu-chek.de

Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

05532604990 ⑦ 0619

ACCU-CHEK® MOBILE

IMMER UND ÜBERALL.

ACCU-CHEK® MOBILE

**BLUTZUCKERMESSGERÄT,
STECHHILFE UND 50 TESTS IN EINEM –
IMMER UND ÜBERALL.**

- ✓ Testkassette mit 50 Tests – keine einzelnen Teststreifen
- ✓ Integrierte 1-Klick-Stechhilfe mit Sechs-Lanzetten-Trommel für eine einfache Blutgewinnung
- ✓ Kein Entsorgen einzelner Teststreifen oder Lanzetten

**Automatische Datenübertragung mit dem
Accu-Chek Mobile Wireless Adapter in die mySugr
App – Das Herzstück für Ihren Alltag mit Diabetes.**



Der Accu-Chek Mobile Wireless Adapter ist separat erhältlich. Jetzt unentgeltlich bestellen: www.accu-chek.de/mobile-adapter-testen oder unter der **kostenfreien Telefonnummer 0800 4466800** (Mo–Fr, 08:00–18:00 Uhr). Weitere Informationen finden Sie unter: www.accu-chek.de/mysugr



Wählen Sie aus 25 Sprachen

u.a. Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch oder Türkisch


MESSEN IN 4 EINFACHEN SCHRITTEN



1 Öffnen
Öffnen Sie den Spitzenschutz.
Das Messgerät schaltet sich ein.



2 Blut entnehmen
Drücken Sie die Stechhilfe fest auf die Seite Ihrer Fingerkuppe. Drücken Sie jetzt den Auslöseknopf ganz nach unten: Nur 1 Klick zum Spannen und Auslösen.

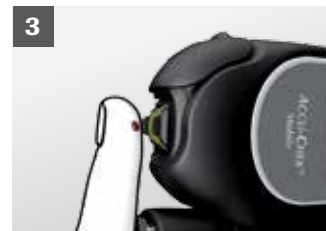

3 Messen
Tragen Sie den Blutstropfen in der Mitte des Testfeldes auf. Berühren Sie dabei das Testfeld nur sanft.



4 Schließen
Nach etwa 5 Sek. können Sie das Ergebnis ablesen. Wenn Sie den Spitzenschutz schließen, schaltet sich das Messgerät aus.