

Vorhersagen – mehr als ein Trend

Wie entwickeln sich Ihre
Zuckerwerte voraussichtlich?



Herunterladen der Apps

Einfach QR-Code scannen und Apps
herunterladen.



Accu-Chek SmartGuide



Accu-Chek SmartGuide Predict

Haben Sie Fragen zu Accu-Chek SmartGuide?

Sprechen Sie Ihr Diabetesteam an oder besuchen Sie unsere Webseite:



accu-chek.de/cgm

Wir freuen uns, wenn Sie sich für Accu-Chek SmartGuide entscheiden.

Wir beraten Sie gerne über die nächsten Schritte:



0800 2231123

Accu-Chek Kundenservice (Mo–Fr, von 08:00–18:00 Uhr)

Kontaktformular: www.accu-chek.de/kontakt

E-Mail: smartguide.de@roche.com

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK SMARTGUIDE und ACCU-CHEK SMARTGUIDE PREDICT sind Marken von Roche. Alle anderen Produktnamen und Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Die hier abgebildeten Bildschirme können von den tatsächlichen Bildschirmen in der App abweichen. © 2025 Roche Diagnostics Deutschland
accu-chek.de | Roche Diagnostics Deutschland GmbH | Sandhofer Straße 116 | 68305 Mannheim

ACCU-CHEK®
SmartGuide

Roche




Accu-Chek SmartGuide
Trendpfeil und Glukosevorhersage erklärt

10683228990 ⓘ 0825



Trendpfeil

Wie sieht es aktuell aus?

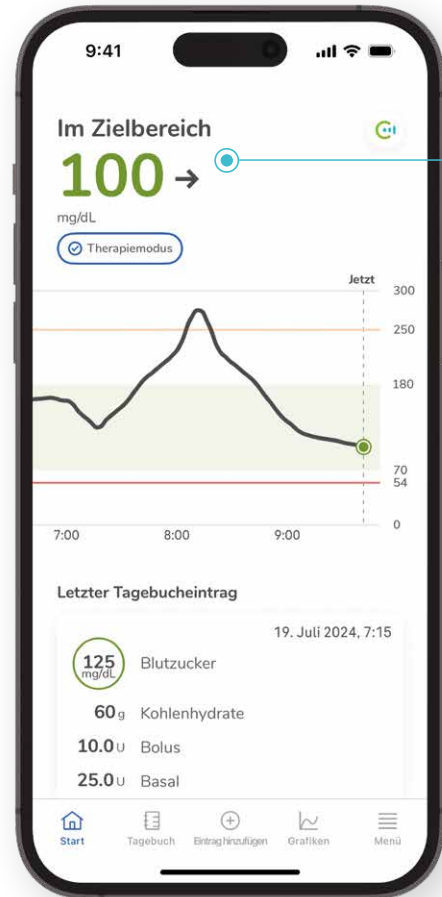

Ihr aktueller Wert mit Trendpfeil

Der Trendpfeil zeigt an, in welche Richtung sich die Zuckerwerte grundsätzlich entwickeln könnten. Dies spiegelt hauptsächlich die aktuellsten CGM-Messwerte wider.

Der Pfeil zeigt an, ob Ihre Zuckerwerte:


- ↑ schnell steigen
- ↗ langsam steigen
- stabil sind
- ↘ langsam sinken
- ↓ schnell sinken



Glukosevorhersage


Handeln Sie vorausschauend!

Die Grafik zeigt die vorhergesagten Zuckerwerte für die nächsten zwei Stunden an, unter anderem basierend auf CGM-Werten, den Tagebuchdaten¹ und der Tageszeit. Sie liefert mehr Details als der Trendpfeil.

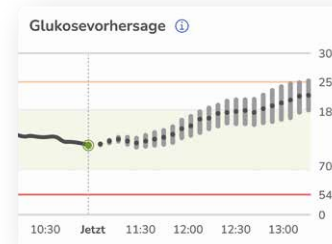


1. Szenario

Der Zuckerwert steigt möglicherweise über 180 mg/dL.

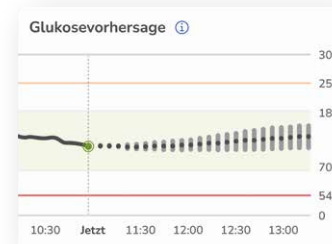

2. Szenario

Der Zuckerwert bleibt möglicherweise im Zielbereich.

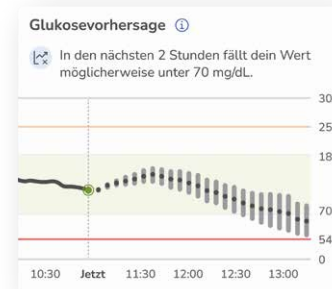

3. Szenario

Der Zuckerwert fällt möglicherweise unter 70 mg/dL.

¹ Tagebuchdaten sind für die Glukosevorhersagen nicht zwingend erforderlich.

Testen Sie jetzt

Accu-Chek SmartGuide

Bestellen Sie unentgeltlich einen
Testsensor und überzeugen Sie sich
von der neuen CGM-Lösung.

Webseite besuchen
www.cgm-testen.de

oder QR-Code scannen

