

Vorhersagen – mehr als ein Trend

Wie entwickeln sich Ihre
Zuckerwerte voraussichtlich?



Herunterladen der App:



Jetzt mySugr App
herunterladen!

Haben Sie Fragen zu Accu-Chek SmartGuide?

Sprechen Sie Ihr Diabetesteam an oder besuchen Sie unsere Webseite:



smartguide-cgm.de

Wir freuen uns, wenn Sie sich für Accu-Chek SmartGuide entscheiden.
Wir beraten Sie gerne über die nächsten Schritte:



0800 2231123

Accu-Chek Kundenservice (Mo–Fr, von 08:00–18:00 Uhr)

Kontaktformular: www.accu-chek.de/kontakt


E-Mail: smartguide.de@roche.com



ACCU-CHEK, ACCU-CHEK SMARTGUIDE und mySugr sind Marken von Roche. Alle anderen Produktnamen und Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Die hier abgebildeten Bildschirme können von den tatsächlichen Bildschirmen in der App abweichen.

© 2026 Roche Diagnostics Deutschland
[accu-chek.de](https://www.accu-chek.de) | Roche Diagnostics Deutschland GmbH | Sandhofer Straße 116 | 68305 Mannheim

ACCU-CHEK®
SmartGuide

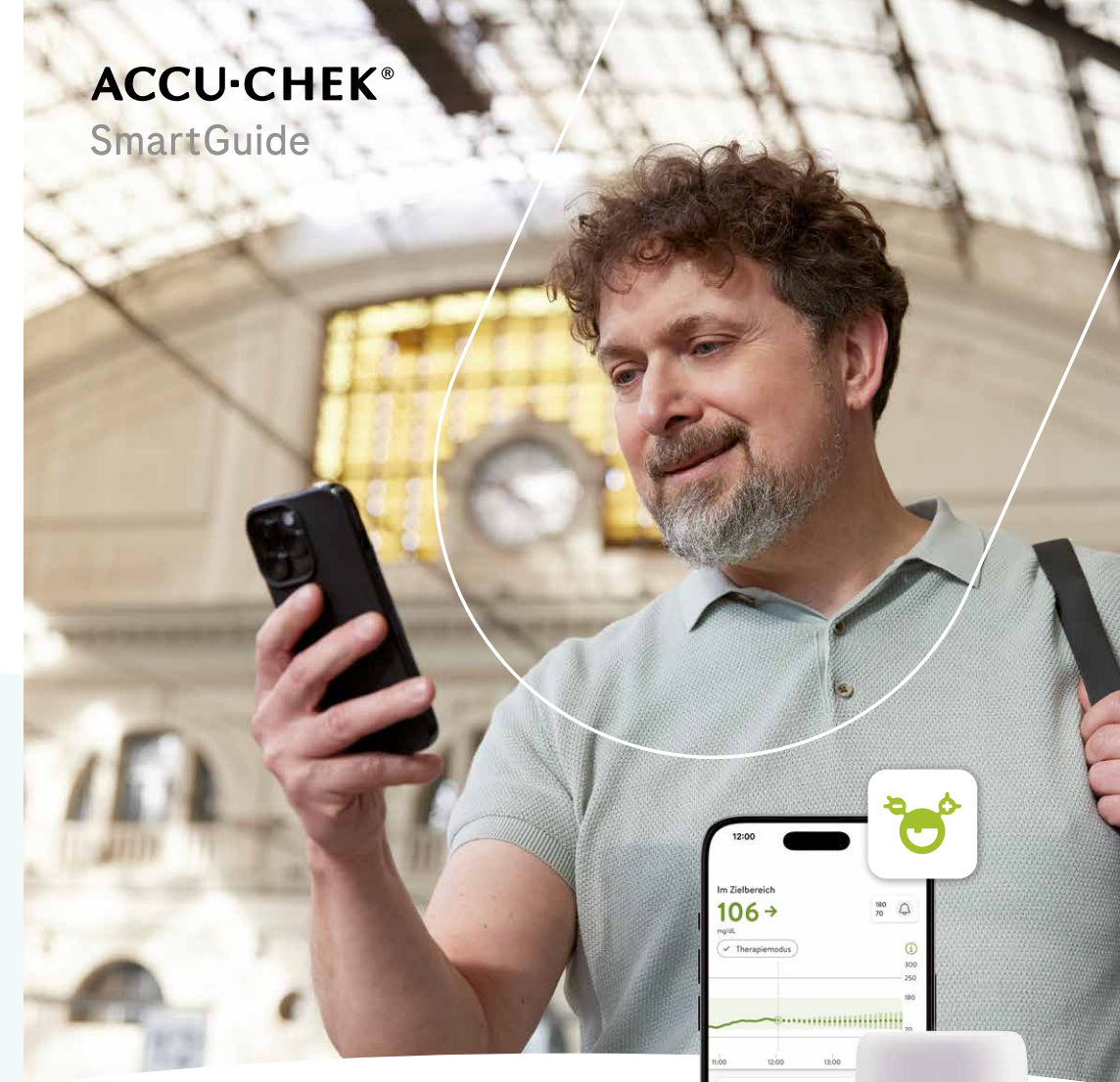

Accu-Chek SmartGuide

Trendpfeil und
Glukosevorhersage erklärt



10683228990 © 0926

Trendpfeil

Wie sieht es aktuell aus?



Ihr aktueller Wert mit Trendpfeil

Der Trendpfeil zeigt an, in welche Richtung sich die Zuckerwerte grundsätzlich entwickeln könnten. Dies spiegelt hauptsächlich die aktuellsten CGM-Messwerte wider.


Der Pfeil zeigt an, ob Ihre Zuckerwerte:

- ↑ schnell steigen
- ↗ langsam steigen
- stabil sind
- ↘ langsam sinken
- ↓ schnell sinken

Glukosevorhersage


Handeln Sie vorausschauend!

Die Grafik zeigt die vorhergesagten Zuckerwerte für die nächsten zwei Stunden an, unter anderem basierend auf CGM-Werten, den Tagebuchdaten¹ und der Tageszeit. Sie liefert mehr Details als der Trendpfeil.

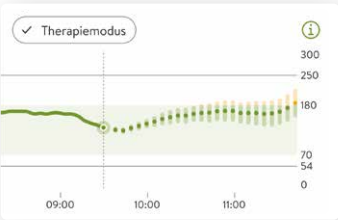


1. Szenario

Der Zuckerwert steigt möglicherweise über 180 mg/dL.

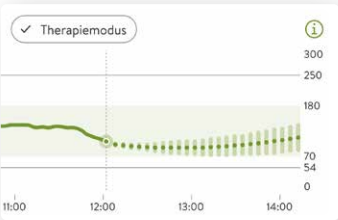

2. Szenario

Der Zuckerwert bleibt möglicherweise im Zielbereich.

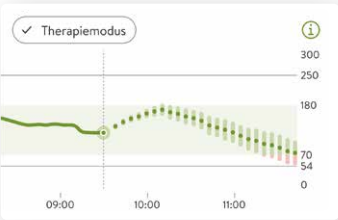

3. Szenario

Der Zuckerwert fällt möglicherweise unter 70 mg/dL.

¹ Tagebuchdaten sind für die Glukosevorhersagen nicht zwingend erforderlich.

Testen Sie jetzt

Accu-Chek SmartGuide

Bestellen Sie unentgeltlich einen Testsensor und überzeugen Sie sich von Ihrer neuen CGM-Lösung.

Webseite besuchen
www.cgm-testen.de

oder QR-Code scannen

