

Schmerzarme Blutgewinnung mit Accu-Chek¹

Patentierte Softmotion Technologie
mit präziser Lanzetten-Führung sowie
dreifach geschliffener Lanzettenspitze.



Accu-Chek FastClix
Lanzetten (204er)
PZN: 07234988

Accu-Chek Softclix
Lanzetten (200er)
PZN: 04522511

ACCU-CHEK, FASTCLIX und SOFTCLIX sind Marken von Roche.
Alle anderen Produktnamen und Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.
© 2024 Roche Diabetes Care Deutschland

accu-chek.de | Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116 | 68305 Mannheim


Nicht vergessen:

Nutzen Sie Ihre Lanzetten nur einmalig,
um schmerzhaften Infektionen vorzubeugen.




Accu-Chek FastClix und Accu-Chek Softclix Stechhilfen – schmerzarm dank Softmotion Technologie

Softmotion Technologie

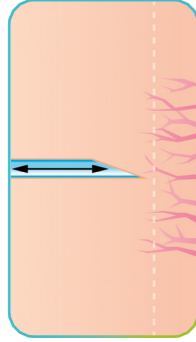


- Beidseitig geführte Accu-Chek Lanzette mit schwingungsfreier Vorwärts- und Rückwärts-Bewegung und Soft Stop.

Beispiel einer konventionellen Technologie

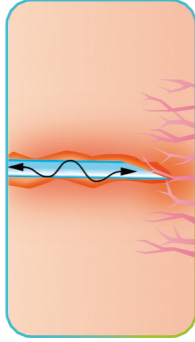


- Einfach geführte Lanzette dringt ohne Soft Stop bis zu den Nervenenden vor.
- Durch Schwingungen der Lanzette entstehen zusätzlich schmerzhafte Gewebeschäden.

Regelmäßiger Lanzettenwechsel kann Schmerzen bei der Messung verhindern²

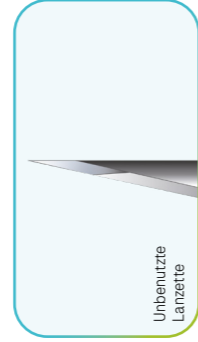

Unbenutzte
Lanzette

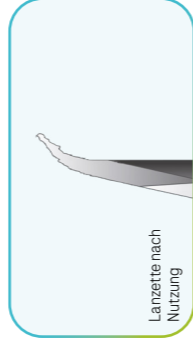

Lanzette nach
Nutzung

- Bereits nach erster Nutzung können sich kleine Widerhaken an der Spitze der Nadel bilden.
- Dadurch können schmerzhafte Reißwunden und Infektionen entstehen.
- Regelmäßiger Lanzettenwechsel kann dies vorbeugen.

¹ Kochev, S., Tshiananga, J. K. & Koubek, R. (2009). Comparison of lancing devices for self-monitoring of blood glucose regarding lancing pain. *Journal of diabetes science and technology*, 3(5), 1136–1143. <https://doi.org/10.1177/193229680900300517>

² Schwarz, P., Dominguez, O. & Neumann, A. (2009). Blutzuckerselbstkontrolle? Komplikationen bei Mehrfachbenutzung steriler Einmallanzetten. *Diabetes Aktuell*, 7(07), 327–330. doi:10.1055/s-0029-1243456

ACCU-CHEK, FASTCLIX und SOFTCLIX sind Marken von Roche.

© 2024 Roche Diabetes Care Deutschland

accu-chek.de | Roche Diabetes Care Deutschland GmbH | Sandhofer Straße 116 | 68305 Mannheim



Lanzetten- wechsel nach jeder Nutzung.

ACCU-CHEK®

Holen Sie sich jetzt
Ihr Rezept!