

Reisen mit meinem DBL

Ziel: Wie funktioniert mein DBL auf Reisen?



Datenübertragung zu YourLoops

Wenn Sie **außerhalb der unten aufgeführten Länder** reisen, unterbricht Ihr DBL die Datenübertragung an YourLoops. Die Daten werden zu Beginn des nächsten Monats nach Ihrer Rückkehr von der Reise schrittweise an YourLoops übertragen.

Verwendung des Energiesparmodus

Der Energiesparmodus ermöglicht **die Unterbrechung der Datenübertragung**, um zu verhindern, dass sich der Akku zu schnell entleert.
Der Energiesparmodus **schaltet sich aus, sobald das DBL aufgeladen wird**.

Wir empfehlen Ihnen, diesen Modus **bei kurzen Reisen** zu verwenden, da unterwegs die Gefahr eines zu hohen Datenverbrauchs besteht (z. B. auf einem Schiff, in den Bergen oder im Flugzeug...).

Es wird auch empfohlen, diesen Modus **bei schwacher 2G/3G-Netzverbindung** (in den Ländern, die von Ihrem DBL abgedeckt werden) zu verwenden, um zu verhindern, dass sich der Akku zu schnell entlädt.

Von der SIM-Karte abgedeckte Länder

Andorra, Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, Kroatien, Dänemark, Estland, Frankreich, Finnland, Deutschland, Gibraltar, Griechenland, Guadeloupe, Französisch-Guayana, Ungarn, Guernsey, Jersey, Reunion & Mayotte, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Martinique, Monaco, Norwegen, die Niederlande, Polen, Portugal, die Tschechische Republik, Rumänien, das Vereinigte Königreich, San Marino, Saint Pierre und Miquelon, Slowakei, Spanien, Schweden und die Schweiz.

Sicherheitskontrollen

Achten Sie darauf, dass Sie Ihre **ärztliche Bescheinigung für Insulinpumpenträger** auf Reisen immer bei sich haben.

Elektromagnetische Wellen (einschließlich Röntgenstrahlen) und Ganzkörperscanner (so genannte AIT- oder Millimeterwellen-Scanner) können Ihr DBL-System beschädigen.

Wenn Sie die Sicherheitskontrolle passieren müssen:

- **Behalten** Sie Ihr DBL-System (DBL, Sensor, Pumpe) am Körper, **gehen Sie NICHT** durch einen Ganzkörperscanner, sondern bitten Sie um eine **Ganzkörperabtastung** und **Sichtkontrolle**.
- ODER**
- **Entfernen** Sie Ihr DBL-System (DBL, Sensor, Pumpe), gehen Sie **OHNE** jegliche Komponenten durch den Körperscanner und bitten Sie um eine **Sichtprüfung der DBL-Komponenten**.

Umweltbedingte Einschränkungen

- Ihr DBL-Handset ist **nicht wasserdicht**; Wasserschäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Wenn Sie **schwimmen** gehen, können Sie die Pumpe entfernen (detaillierte Anweisungen finden Sie in Ihrem Benutzerhandbuch).
- Ihr Gerät reagiert **empfindlich auf Temperaturschwankungen**. Stellen Sie sicher, dass Sie es vor Hitze ($>37^{\circ}\text{C}$) und Kälte ($< 5^{\circ}\text{C}$) schützen können.
- Verwenden Sie einen **Overpatch**, wenn Sie sich in einer sehr heißen Gegend aufhalten, um zu verhindern, dass sich der CGM Sensor durch Schwitzen ablöst.

Tipps:

- Stellen Sie sicher, dass Sie während eines langen Fluges, einer Bootsfahrt oder einer Zugfahrt eine **alternative Insulintherapie** mit sich führen, und lesen Sie in Ihrer Gebrauchsanweisung nach, wie Sie DBL verwenden können.
- **Bewahren Sie Ihre Vorräte (Insulin, zusätzliche Sensoren/Transmitter) in Ihrem Handgepäck auf, um sie vor Temperaturschwankungen zu schützen.**
- Beachten Sie, dass das mit Ihrem System gelieferte **Netzteil** möglicherweise nicht mit dem Land Ihres Besuchs kompatibel ist.
- Um die **Zeitzone** Ihres DBL manuell zu ändern, wenn Sie sich in einem Land befinden, das nicht von der SIM-Karte abgedeckt wird: Gehen Sie zu Hauptenü/Einstellungen/Anwendung/Zeit, deaktivieren Sie "Automatische Zeitzone" und klicken Sie auf "Stellen Sie die Zeitzone ein"