يسهل جهاز قياس أكيو-تشيك جايد الكثير من الأمور.



وستجد المزيد من إرشادات الاستعمال في فيديو المنتج الموجود في الرابط www.accu-chek.de/guide أو ستجدها في نشرة العبوة.

إجراء قياس السكر في الدم



خلع أشرطة الاختبار

ادفع أشرطة الاختبار من الأمام أو من الخلف بضغطة خفيفة تجاه الأعلى. يحظر مس أي جزء من أجزاء أشرطة الاختبار سوى الجانب العلوي.



وضع الدم

المس نقطة الدم بالحافة الصفراء لشريط الاختبار وانتظر حتى تظهر "تم إجراء القياس".



إدخال أشرطة الاختبار

أدخل أشرطة الاختبار في مكان إدراج أشرطة الاختبار في اتجاه السهم. عند قيامك بتشعيل الجهاز قبل ذلك، فإنك تقوم بتتشيط الإضاءة آليًا.



إخراج أشرطة الاختبار

اخلع أشرطة الاختبار بالضغط على زر إخراج شريط الاختبار أو بنزع شريط الاختبار.

Accu-Chek FastClix. تحتاج فقط لنقرة واحدة لاستخراج الدم.

التحضير

تركيب أسطوانة المشارط

استخراج الدم ببساطة نقرة واحدة فقط!

إعداد وإزالة أسطوانة المشارط

المعالجة اللاحقة



3. تركيب الغطاء



2. إدخال الأسطوانة





اضغط على زر الإطلاق إلى الأسفل بالكامل، لاستخراج الدم.



وإخراج الأسطوانة.

1. حرك الذراع إلى النهاية ناحية الأسفل أولًا، ثم قم بتحريكها مرةً أخرى إلى الأعلى.

أسطو انة

تنبيه: لا تقم بإزالة أسطوانة المشارط، قبل أن يتم استهلاك جميع المشارط بالكامل. وإذا حدث وتمت إزالتها، فلا يمكن استخدامها مرةً أخرى لأسباب صحية.

ACCU-CHEK ACCU-CHEK GUIDE و FASTCLIX هم علامات تجارية تملكهم Roche. © Roche Diabetes Care 2018. جميع الحقوق محفوظة.

www.accu-chek.de

Roche

Roche Diabetes Care Deutschland GmbH Sandhofer Straße 116 Mannheim 68305

هل ترغب في معرفة المزيد؟

يسعد موظفونا في مركز خدمة عملاء Accu-Chek بالوقوف بجانبكم! رقم الهاتف المجانى 4466800 (الاثنين-الجمعة، 08:00 ص - 6:00 م). أو تفضل بزيارة بوابتنا الإلكترونية على الرابط www.accu-chek.de



أسطوانة غير مستخدمة