

ACCU-CHEK® MOBILE

قم بقياس سكر الدم لديك في أي وقت وأي مكان.

قم بالقياس في 4 خطوات سهلة



خذ عينة الدم
أضغط على وحدة الوخز بقوة على جانب أظفار الأصبع. أضغط الآن على زر الإطلاق إلى
أسفل تماماً: نقرة 1 فقط للشد والإطلاق.



الفتح
قم بفتح واقي القمّة.
جهاز القياس سوف يبدأ في العمل.



الغلق
بعد 5 ثواني تقريباً يمكنك قراءة النتيجة. إذا أغلقت واقي القمّة، فسوف يتوقف
الجهاز تلقائياً عن العمل.



القياس
ضع قطرة الدم في منتصف منطقة الاختبار. قم بملامسة منطقة الاختبار برقة.



خرطوشة اختبارات بها 50 اختبار

أسطوانة أدوات وخز
بها 6 أدوات وخز معقمات

استبدال خرطوشة أدوات الوخز



أزغ الغطاء من وحدة مساعدة الوخز.



أزغ أسطوانة أدوات الوخز.



1 خرطوشة أدوات الوخز
6 أدوات وخز

ضع خرطوشة أدوات وخز جديدة (الطرف الأبيض أولاً).
الآن يتوافر لديك للاستعمال 6 أدوات وخز معقمة.



ضع الغطاء مرة أخرى.

التشغيل / استبدال خرطوشة الاختبار (1-3)



أفح واطي القمة تماماً وحتى النهاية. بهذا فقط تستطيع فتح مقر الخرطوشة ووضع خرطوشة الاختبار.



ادفع زر الفتح الخاص بغطاء مقر الخرطوشة إلى أعلى.



ضع خرطوشة اختبار جديدة في جهاز القياس. اغلق غطاء مقر الخرطوشة وواقي القمة.



اسحب إلى الخلف رقاقة الحماية الخاصة بالبطاريات من جهاز القياس. أزغ رقاقة الحماية من شاشة العرض.

تحضير أداة وخز



جهاز وحدة مساعدة الوخز لأخذ عينة الدم في المرة القادمة: حرك الزر في اتجاه 1 ثم حركه مرة أخرى في اتجاه 2



قم بتدوير الغطاء، حتى يتواجد عمق الوخز المرغوب فيه على العلامة. إبدأ بعمق وخز متوسط، على سبيل المثال 3.



أزغ خرطوشة أدوات الوخز فقط بعد استهلاك جميع الأدوات الـ 6.



خرطوشة أدوات الوخز التي تم نزعها لا يمكن وضعها في الجهاز مرة أخرى. يمكن التعرف عليها من الشريط الأحمر.



www.accu-check.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

إن ACCU-CHEK MOBILE و FASTCLIX و علامات تجارية مملوكة لشركة Roche.
حقوق الطبع محفوظة لـ Roche Diabetes Care 2019 جميع الحقوق محفوظة.