


Accu-Chek Guide simplifica muchas cosas.



Encontrará más información acerca del uso del dispositivo en el vídeo del producto: www.accu-chek.de/guide y en el folleto incluido en la caja.

Cómo realizar una medición de glucemia

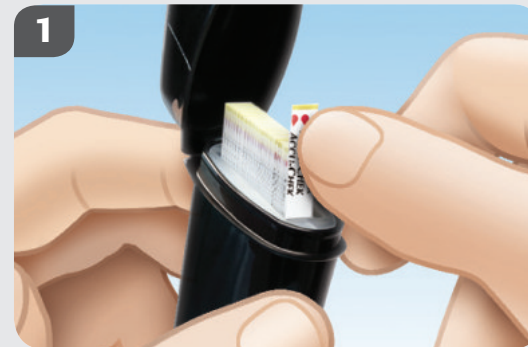

Sacar la tira reactiva

Deslice hacia arriba la primera o la última tira reactiva aplicando un poco de presión. Puede tocar la parte superior de esta tira reactiva.



Introducir la tira reactiva

Introduzca la tira reactiva en el puerto para tiras reactivas en la dirección de la flecha. Si el medidor está apagado, se encenderá automáticamente.



Aplicar la sangre

Acerque la gota de sangre al borde amarillo de la tira reactiva y espere hasta que en la pantalla aparezca 'Midiendo'.



Expulsar la tira reactiva

Para sacar la tira reactiva pulse el botón de expulsión o tire de ella.

ACCUCHEK®

Accu-Chek FastClix. Obtención de la gota con un solo clic.

Preparación

Colocar un cartucho de lancetas



1. Quite el capuchón

2. Introduzca el cartucho

3. Coloque el capuchón



Gire el capuchón hasta que en la marca aparezca la profundidad de penetración deseada.

Obtención de la gota

¡Con un simple clic!

Solo 1 clic
para tensar y
disparar



Apriete el botón disparador completamente hacia abajo para extraer la sangre.

Preparación para volver a utilizarlo

Preparar el cartucho de lancetas y sacarlo



1. Gire el botón de resorte hasta el tope moviéndolo primero hacia abajo y luego hacia arriba.

2. Para sacar el cartucho de lancetas, quite el capuchón y saque el cartucho.

Cartucho sin usar



Cartucho usado



Atención: Saque el cartucho de lancetas solo cuando haya utilizado todas las lancetas. Después de sacarlo, el cartucho no se puede volver a utilizar por motivos de higiene.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE y FASTCLIX son marcas de Roche.
© 2018 Roche Diabetes Care. Todos los derechos reservados.



www.accu-chek.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

¿Quiere saber más?

¡Nuestros colaboradores del Centro de Atención al Cliente de Accu-Chek están a su disposición!

Número de teléfono gratuito 0800 4466800 (Lu-Vi, 08:00-18:00 h).

O visite nuestro portal online en www.accu-chek.de

ACCU-CHEK®