





In wenigen Schritten zur sanften Blutgewinnung




Vorbereitung
Waschen Sie Ihre Hände mit warmem Wasser und Seife, bevor Sie Blut entnehmen. Trocknen Sie Ihre Hände gut ab.

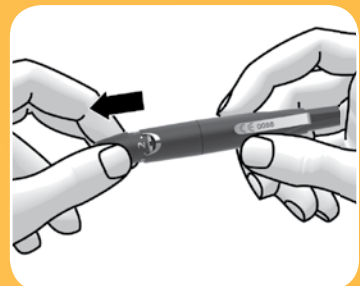

Kappe abziehen
Ziehen Sie die Kappe von der Stechhilfe ab.

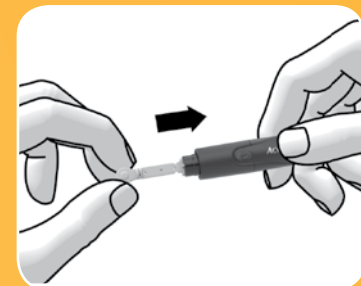

Lanzette einsetzen
Setzen Sie eine neue Lanzette in den Lanzettenhalter ein. Drehen Sie die Schutzkappe von der Lanzette ab. Setzen Sie die Kappe der Stechhilfe wieder auf.

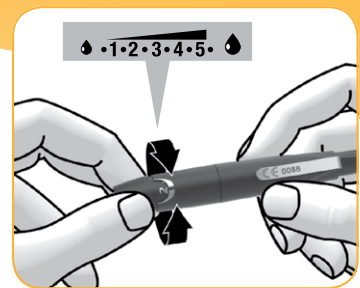

Stechtiefe einstellen
Sie können 11 Stechtiefen (0,5 bis 5,5) einstellen. Drehen Sie die Kappe bis die gewünschte Stechtiefe an der Markierung steht.



Stechhilfe spannen und Blutstropfen entnehmen
Drücken Sie den Spannknopf ganz durch. Die Stechhilfe ist gespannt, wenn die Mitte des Auslöseknopfes gelb ist. Drücken Sie die Stechhilfe fest auf die gewünschte Einstichstelle. Drücken Sie den Auslöseknopf, um Blut zu entnehmen.



Benutzte Lanzette auswerfen
Ziehen Sie die Kappe von der Stechhilfe ab und schieben Sie den Auswerfer nach vorn. Die benutzte Lanzette wird ausgeworfen. Setzen Sie die Kappe wieder auf.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT und SOFTCLIX sind Marken von Roche.
© 2020 Roche Diabetes Care Deutschland

accu-check.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim